

BORT Spezial-Waschmittel: eine saubere Sache



Das BORT Spezial-Waschmittel ist optimal für die Handwäsche von medizinischen Kompressionsstrümpfen, Bandagen und gummielastischen Gestrieken geeignet.

Ein echtes Allroundtalent

- Hochwirksames Handwaschmittel-Konzentrat
- Angenehmer Duft
- Für den täglichen Gebrauch
- Optimale und sparsame Dosierung
- Schonende Wirkung dank feinporigem Aktivschaum
- Löst verschiedenste Verschmutzungen (z. B. Fette, Schweiß, Haare, Hautschuppen usw.) schon bei niedrigen Temperaturen
- Verhindert das Wiederanschnutzen des Gewebes
- Schonende Pflege für Gewebe, Haut und Hände

Löst
Hautfette bereits
bei niedrigen
Temperaturen

Biologisch
abbaubar


pH-neutral



Warum tägliches Waschen von Kompressionsstrümpfen wichtig ist

- Erhalt der Kompressionswirkung:

Das tägliche Waschen der Strümpfe sorgt zusätzlich für eine optimale Kompressionsversorgung. Das Gestrick zieht sich wieder zusammen und geht in seine ursprüngliche Form zurück.

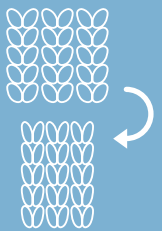

- Vermeidung von unangenehmen Gerüchen: Tägliches Waschen sorgt für ein sauberes und angenehmes Tragegefühl.




Durchblick behalten



- Transparente Flasche zeigt den Füllstand
- Auch als Probesachet erhältlich

Kompressionsstrümpfe & Co. richtig waschen


- 1** 10 ml in 2–3 l lauwarmes Wasser geben

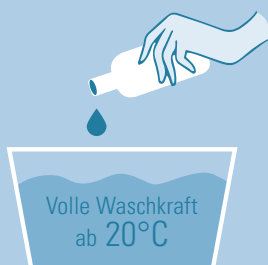

- 2** 5–10 Minuten einwirken lassen



- 3** Gründlich ausspülen

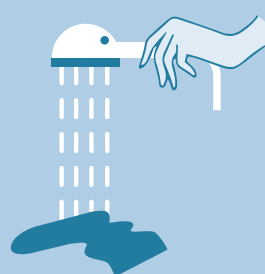

- 4** In einem Handtuch vorsichtig ausdrücken



- 5** Aufhängen und trocknen lassen



Wichtige Hinweise

Augenkontakt vermeiden!



Nicht verschlucken!



Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!



Was Sie sonst noch beachten sollten

Keinesfalls auswringen!



Keine Wäscheklammer benutzen!



Nicht liegend trocknen!



Nicht über einer Heizung trocknen!



Das Plus für Ihre Kunden

- ⊕ Lange Freude beim Tragen von Kompressionsgestrieken
- ⊕ Optimale Kompressionswirkung
- ⊕ Umweltschonendes Waschen
- ⊕ Hohe Ergiebigkeit



BORT. Das Plus an Ihrer Seite®