

# BORT Spezial-Hautkleber

für medizinische Kompressionsstrümpfe



- ➕ Zur sicheren Befestigung für BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe
- ➕ Wie ein Deoroller auf die Haut auftragen und Gestrickabschluss andrücken
- ➕ Hautfreundlich, lässt sich rückstandslos mit Wasser von der Haut entfernen


Der BORT Spezial-Hautkleber ist eine spezielle wasserlösliche Klebelotion für die Befestigung von medizinischen Kompressionsversorgungen an Armen und Beinen.

## Inhaltstoffe:

Propan-2-ol, Aqua, Polyvinylpyrrolidon, Glycerin

## Anwendung

Vor der Anwendung muss die Haut trocken und sauber sein, alte Klebereste von einer vorherigen Anwendung sollten von Arm und Bein sowie von dem Kompressionsstrumpf entfernt werden. Ziehen Sie die medizinische Kompressionsversorgung gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers der Kompressionsversorgung an. Legen Sie den Rand nach unten um und tragen Sie den Klebstoff mit der Roll-on Kugel auf die freigelegte Haut (**A** und **B**). Ein einmaliges Auftragen der Klebelotion rund um den Arm oder das Bein herum ist ausreichend. Klappen Sie anschließend den Strumpfrand wieder hoch und drücken Sie ihn an die Haut an. Bei Strümpfen mit einem Silikonrand sollte die Klebelotion im Bereich unterhalb des Haftbands aufgetragen werden. Bei flachgestrickten Kompressionsversorgungen sollte die Klebelotion in zwei Längsstreifen (senkrecht) auf die Haut aufgetragen werden (s. Abb. **C** und **D**).

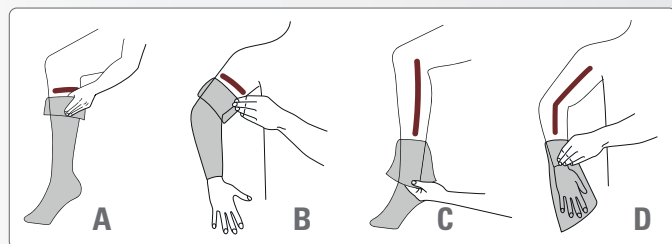

## Anwendungsdauer

Die Klebelotion ist für den täglichen Gebrauch geeignet.

## Reinigungshinweise

Reste der Klebelotion lassen sich von der Haut oder dem Strumpf mit Wasser mühelos abwaschen. Zusätzliche Reiniger oder Desinfektionstücher sind nicht erforderlich. Täglich nach dem Ausziehen des Kompressionsstrumpfes entfernen Sie alle Klebereste von Arm oder Bein mit Wasser und waschen Sie die Kompressionsversorgung gemäß den Vorgaben des Kompressionsstrumpf-Herstellers. Der BORT Spezial-Hautkleber ist wasserlöslich, enthält weder Farb- noch Parfümstoffe und hinterlässt keine Flecken.

## Besondere Hinweise

Zum Ausziehen kann der Kompressionsstrumpf an den Klebestellen vorab mit einem nassen Lappen angefeuchtet werden. Dadurch löst sich der Kleber und erleichtert das Ausziehen. Schweiß, andere Flüssigkeiten, Hautpflegeprodukte oder Wasseraktivitäten können zu einem Verlust der Haftkraft des Klebers führen, so dass der BORT Spezial-Hautkleber möglicherweise erneut aufgetragen werden muss. Die Klebelotion ist nicht für die Klebeverbindung zwischen zwei oder mehr Kompressionsversorgungen konzipiert.

## Kontraindikationen

- Entzündete oder nässende Hauterkrankungen (inkl. Neurodermitis)
- Offene Wunden
- Unverträglichkeit auf die Inhaltstoffe

Nicht in Hautbereichen anwenden, die einer medizinischen oder kosmetischen Behandlung unterzogen werden (Nikotinplaster, Lotionen, Make-up-Produkte, Parfüm, Haarentfernungscremes / Öle, etc.). Nicht auf Piercings, tätowierte Haut sowie Infusionsschläuche auftragen.

## Verkaufseinheit

REF 599 080 Roll-on-Sticks à 60 ml

REF 599 086 6x Roll-on-Sticks à 60 ml

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®**

# BORT Spezial-Hautkleber

für medizinische Kompressionsstrümpfe



Bei Verletzungen oder Unverträglichkeitsreaktionen oder Unwohlsein ziehen Sie den Strumpf aus und reinigen Sie die Haut gründlich mit Wasser.

Nicht für andere Zwecke einsetzen, nicht als Deodorant verwenden! Klebelotion nicht in Kontakt mit Augen bringen. Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Klebelotion nicht verschlucken. Nach Verschlucken, Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen.

Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das sich im Zusammenhang mit dem BORT Spezial-Hautkleber ereignet hat, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

## Warnungen/Anwendungseinschränkungen

Halten Sie die Rollkugel bei Anwendung stets sauber. Das Produkt ist nur für die Verwendung durch einen einzigen Benutzer vorgesehen. Bei einer falschen Dosierung/Anwendung des BORT Spezial-Hautkleber kann keine Garantie für die angegebenen Ergebnisse gegeben werden.

Kinder und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen müssen durch Pflegepersonal oder Angehörige in der Anwendung unterstützt werden.

Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt vor der Anwendung, falls Sie Medikamente einnehmen, die die Hautreaktion beeinflussen können (Glucocorticoide, Antiallergika, topische Immunmodulatoren, etc.) oder Ihre Haut durch Verletzungen, Irritationen, Behandlungen etc. beeinträchtigt ist.

Für eine optimale Haftung ist es empfohlen, die Hautfläche, auf der die Klebelotion aufgebracht wird, vor der Anwendung zu rasieren oder zu enthaaren. Den BORT Spezial-Hautkleber nicht direkt nach der Rasur auftragen, um Hautreizungen und – sensibilisierungen zu vermeiden.

Nach der Anwendung des BORT Spezial-Hautkleber muss der Anwender seine Hände gründlich mit Wasser waschen, um Klebelotionsrückstände zu entfernen.

## Haltbarkeit, Gewährleistung, Transport und Lagerung, Entsorgung

Bitte schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit. Wir empfehlen die Aufbewahrung bei Raumtemperatur. Das Produkt sollte stets gut verschlossen, stehend gelagert und transportiert werden.

⚠ Weitere Hinweise finden sie auch im Sicherheitsdatenblatt unter [www.bort.com](http://www.bort.com). Bei Unfall oder Unwohlsein erhalten Sie 24 h unter der Giftnotrufnummer +49 761 19240 Auskunft.

Wegen Materialalterung kann die Leistungsfähigkeit der Klebelotion nur für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet werden. Das Haltbarkeitsdatum der Klebelotion ist auf der Flasche angegeben. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr als Klebelotion verwenden. Bewahren Sie das Produkt ausschließlich in der verschlossenen Originalflasche auf. Die Klebelotion und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Vertrieb durch:  
**BORT GmbH**  
Am Schweizerbach 1  
71384 Weinstadt  
[medical@bort.com](mailto:medical@bort.com)  
[www.bort.com](http://www.bort.com)



Ultrana GmbH  
Mackstraße 112  
88348 Bad Saulgau  
Email: [info@ultrana.de](mailto:info@ultrana.de)  
Homepage: [www.ultrana.de](http://www.ultrana.de)

Medizinprodukt  
Stand: 05.2020

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®**

BORT GmbH Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0  
Telefax (07151) 99200-50 | [www.bort.com](http://www.bort.com) | [medical@bort.com](mailto:medical@bort.com)