

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

**A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.**

### Termékleírások

Ez egy orvostechnikai eszköz. Egy neoprén hüvelykujj rögzítő a nyeregizület és a hüvelykujj tövének stabilizálására.

### Javallatok

Túlterhelés megelőzés, rándulások, duzzanatok, terheléstől kialakuló irritációk.

### Ellenjavallatok

Perifériás artériás elzáródásos betegség (PAOD), nyirokelvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanatok akár az alkalmazott orvostechnikai eszköztől távol. Érzékszervi és keringési zavarok a z ellátott testrész régiójában, illetve bőrbetegségek a kezelt testrész területén.

### Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsibadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újrahasználható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- az ortézis viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkreteszheti az anyagot

### Felhelyezés

Helyezze fel a rögzítőt az érintett csuklóra. Dugja bele a hüvelykujját a hüvelykujj nyílásba, majd távolítsa el a tépőzárat a kéz belső oldalán és tekerje rá az anyagot a csuklójára. Végül rögzítse a tépőzárat.

### Eltávolítás


A rögzítő eltávolításához oldja ki a csuklón levő tépőzárat, majd húzza le az eszközt.

### Anyagösszetétel

Poliamid (PA), neoprén, elasztán (EL), poliészter (PES)

A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

### Tisztítási információk

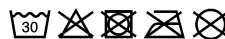

Kímélő mosás. Vegytisztítás, fehérités, vasalás, szárítógépben szárítás tilos. Ne használjon öblítőt. Levegőn szárítsa.

### Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igénytel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

### Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

### Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

### Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

### Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelési nyilatkozatot az alábbi linken találja: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Lezárva: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,  
[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)



PDF:  
[ga.bort.com](http://ga.bort.com)

