

# BORT Spezial-Waschmittel

für medizinische Kompressionsgestricke



- ⊕ Speziell für medizinische Kompressionsgestricke
- ⊕ Höchste Reinheit bei der Handwäsche
- ⊕ Einfache Anwendung für den täglichen Gebrauch



**Art.-Nr. 599 070**

PZN: 13059911

BORT Spezial-Waschmittel

**Inhalt: 250 ml**

**Art.-Nr. 599 076**

PZN 13059928

BORT Spezial-Waschmittel – 6er Karton

**Inhalt: 6 x 250 ml**

## Eigenschaften:

BORT Spezial-Waschmittel ist ein ph-neutrales, hochwirksames Handwaschmittel-Konzentrat für alle gummielastischen Gestricke. Es entfaltet bereits bei 20°C seine volle Waschkraft, ist desodorierend und biologisch abbaubar.

BORT Spezial-Waschmittel trocknet die elastischen Teile des Gestricks nicht aus und sorgt für die bestmögliche Pflege Ihrer Hilfsmittel.

## Anwendung:

Eine halbe Verschlusskappe (10 ml) in ca. 2-3 l handwarmem Wasser auflösen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser ausspülen.


 10 ml auf 2-3 l Wasser

## Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffangabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergentienverordnung)

AQUA, SODIUM C14-17 SEK ALKYL SULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE, PPG-4 LAURETH-5, COCAMIDE DEA, ISOPROPYL ALCOHOL, LAURETH-2, PARFUM, DIETHANOLAMINE, LINALOOL, AMYL SALICYLATE

Informationen über INCI-Bezeichnungen unter <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>  
Stand: 23:06.2016

 Hersteller Ultrana GmbH, D-88345 Bad Saulgau  
Vertrieb durch: BORT GmbH, Postfach 1330, D-71367 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)  
Vertrieb in der Schweiz durch: Orthosan AG, [www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)