

# BORT Spezial-Hautkleber

für medizinische Kompressionsstrümpfe



- ⊕ Zur sicheren Befestigung für BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe
- ⊕ Wie ein Deoroller auf die Haut auftragen und Gestrickabschluss andrücken
- ⊕ Hautfreundlich, lässt sich rückstandslos mit Wasser von der Haut entfernen



**Art.-Nr. 599 080**

PZN: 13059957

BORT Spezial-Hautkleber

**Inhalt: 60 ml**

**Art.-Nr. 599 086**

PZN 13059963

BORT Spezial-Hautkleber – 6er Karton

**Inhalt: 6 x 60 ml**

Pos.-Nr. 17.06.07.0013

Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

## Eigenschaften:

Mit dem BORT Spezial-Hautkleber befestigen Sie einfach und problemlos Ihre BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe. BORT Spezial-Hautkleber ist mit Wasser abwaschbar, hinterlässt keine Flecken und ist mit dermatologisch „sehr gut“ getestet.

## Anwendung:

Der Kompressionsstrumpf wird wie üblich angezogen. Dann wird der Rand nach unten umgelegt und der Klebstoff auf die Haut aufgetragen. Den Rand wieder hochklappen und an die Haut andrücken. Der Strumpf hält problemlos ohne weitere Befestigung.

## Inhaltsstoffe:

PVP/VA Copolymere, Glycerin, Isopropylalkohol

 Hersteller Ultrana GmbH, D-88345 Bad Saulgau

Vertrieb durch: BORT GmbH, Postfach 1330, D-71367 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Vertrieb in der Schweiz durch: Orthosan AG, [www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)