

# BORT AIR Walker

---

## **Gebrauchsanleitung:**

Zum Anlegen des BORT AIR Walkers öffnen Sie zunächst alle Klettverschlüsse und nehmen das aufgeklebte Frontpanel ab. Anschließend öffnen Sie den textilen Lagerungsschaft und legen den Unterschenkel und Fuß so in den Lagerungsschaft, dass die Ferse in dem für sie vorgesehenen Fersenbett liegt. Schließen Sie den Lagerungsschaft vorn. Nun positionieren Sie das Frontpanel auf dem Lagerungsschaft. Beiliegende Polster können zur zusätzlichen Weichbettung verwendet werden.

Um den BORT AIR Walker sicher am Bein zu fixieren, schließen Sie zuerst den Klettverschluss im Bereich des Sprunggelenks, anschließend den Verschluss über den Mittelfuß und abschließend das Klettband am oberen (proximalen) Abschluss. Zu beachten ist ein glattes und faltenfreies Anlegen der Verschlussbänder. Die Blutzirkulation darf nicht beeinträchtigt werden.

Über die seitlichen, ergonomisch positionierten Pumpen kann nun das mediale (innere) und laterale (äußere) Luftkissen individuell und voneinander unabhängig aufgepumpt und somit eine optimale Stabilisierung erreicht werden.

Um Luft aus den Kammern abzulassen, klappen Sie die seitlich hinter den Luftpumpen positionierten Kunststoffkappen auf und lassen Luft durch eindrücken des Metallknopfes ab.

## **Indikationen:**

Zur konservativen Therapie bei:

Akuten Sprunggelenkdistorionen, Unterschenkelweichteilverletzungen, stabile Frakturen des Fußes und Sprunggelenks, stabile Frakturen der distalen Tibia und Fibula, operative Eingriffe im Mittel- und Vorfußbereich.

## **Kontraindikation:**

Periphere Arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteil-Schwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

## **Materialzusammensetzung:**

70% Polyamid, 30% PUR Ester

## **Wichtiger Hinweis:**

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt.

Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Orthese lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

<b>Größe</b>	<b>Schuhgröße</b>
small	bis 38
medium	39 - 41
large	42 - 45

## **Pflegeanleitung:**

Die Polsterteile können unter Verwendung von Feinwaschmittel bei Handwäsche gereinigt werden. Nicht Trockner geeignet. Metall und Kunststoff Komponenten können mittels eines feuchten Tuches gesäubert werden. Keine scharfen Reinigungssubstanzen verwenden.

