



Paljon kiitoksia siitä, että luotat BORT GmbH:n lääkinälliseen laitteeseen. Lue olemassa olevat käyttöohjeet huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärisi tai sen erikoisliikkeen puoleen, josta ostit tämän lääkinällisen laitteen.

### Käyttötarkoitus

Tämä lääkinällinen laite on rannetuki, joka immobilisoi ranteen vähintään kahteen liikesuuntaan.

### Käyttöaiheet

Preoperatiivinen, postoperatiivinen, posttraumaattinen, degeneratiivinen, karpaalitunnelin oireyhtymä (CTS), tenosynoviitti, ääreishermon halvaus.

### Vasta-aiheet

Perifeerinen valtimotukos (PAOD), imunestjärjestelmän häiriöt, myös epäselvät pehmytkudosturvotukset paikalleen asetetusta tuesta distaalisesti, aisti- ja verenkiertohäiriöt hoidettavalla kehon alueella, ihosairaudet hoidettavalla kehon osalla.

### Käyttöön liittyvät riskit/tärkeät huomautukset

Tämän lääkinällisen laitteen voi määrätä lääkemääräyksellä. Keskustele käytöstä ja sen kestosta hoitavan lääkärisi kanssa. Asiantunteva henkilökunta, jolta olet saanut lääkinällisen laitteen, valitsee sopivan koon ja opastaa sinua sen käytössä.

- poista lääkinällinen laite ennen radiologisia tutkimuksia
- älä sulje sitä liian tiukasti pidempien lepojakojen aikana, esim. nukkuessasi
- jos ilmenee puutumista, löysää lääkinällinen laite ja poista se tarvittaessa
- jos vaivat jatkuvat, käänny lääkärin tai tuotteen myyneen erikoisliikkeen puoleen
- käytää lääkinällistä laitetta terapeuttisten tarpeiden mukaisesti
- Käytä muita tuotteita samanaikaisesti vain lääkärin kanssa neuvoteltuasi
- älä tee tuotteeseen mitään muutoksia
- älä käytä sitä avoimien haavojen päällä

- ei saa käyttää, jos jokin käytetyistä materiaaleista aiheuttaa intoleranssia
- ei uudelleenkäyttöä - tämä lääkinällinen apuväline on tarkoitettu yhden potilaan hoitoon
- kun käytät tukea, älä käytä mitään voiteita tai salvoja sen päällä tai ympärillä, koska ne voivat vahingoittaa materiaalia

### Sovitusohjeet

Tukea voidaan käyttää molemmilla puolilla. Varmista, että peukalo ohjataan joko vasemman- tai oikeanpuoleisen peukalo-aukon läpi, riippuen puolesta. Taivuta alumiiniset lastat haluttuun muotoon ennen pukemista. Ohjaa käsi tukeen ja aseta ensin kämmenen ympärystä kämmenselälle käyttämällä kahta tarra-nauhakiinnikettä. Sulje sitten kyynärvarren tarranauhakiinnitys. Kiinnitä lopuksi kiertoahna ranteeseen.

Vinkki: kämmenselän hihna voidaan jättää ohjaussilmukoihin, jotta irrottaminen ja asettaminen olisi helpompaa.

### Irrottaminen

Avaa tarranauhakiinnikkeet, kun haluat irrottaa tuen. Tartu lastaan kämmenen alueelta ja vedä tuki pois sormien yli. Sulje tarranauhakiinnikkeet, jotta tarranauhan pinta ei kulu ennen aikaisesti.

### Materiaalikoostumus

Polyamidi (PA), polyesteri (PES), polyuretaani (PUR).

Tuotteeseen ommeltu tekstiililappu kertoo tarkan materiaalikoostumuksen.

### Puhdistustiedot



Hienopesu 30°C, Ei saa valkaista, Ei saa kuivata kuivausrum-mussa, Ei saa silittää, Ei saa puhdistaa kemiallisesti.

Poista alumiinilasta ennen pesua. Sulje tarranauhakiinnikkeet, jotta muut vaatekappaleet eivät vahingoitu. Älä käytä huuhteluai-netta. Venytä takaisin muotoonsa ja kuivaa raittiissa ilmassa.

## Takuu

Ostettuun tuotteeseen sovelletaan sen maan lakisääteisiä määräyksiä, josta olet hankkinut tuotteen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos epäilet, että kyseessä on takuuvaatimus. Puhdistu tuote ennen takuuvaatimuksen esittämistä. Jos oheisia käyttöohjeita ei ole noudatettu asianmukaisesti, takuu voi heikentyä tai peruuntua. Takuu ei kata tuotteen käyttötarkoitukseen sopimatonta käyttöä, käyttöriskien ja ohjeiden huomioimatta jättämistä eikä tuotteeseen tehtyjä luvattomia muutoksia.

## Tuotteen käyttöikä/elinkaari

Lääkinnällisen laitteen käyttöikä määräytyy sen luonnollisen kulumisen mukaan, jos sitä hoidetaan asianmukaisesti ja suositusten mukaisesti.

## Ilmoitusvelvollisuus

Jos terveydentila heikkenee vakavasti lääkitsevän laitteen käytön aikana, sinun on ilmoitettava asiasta erikoistuneelle jälleenmyyjälle tai meille valmistajana ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Löydät yhteystietomme näistä käyttöohjeista. Maasi kansallisen viranomaisen yhteystiedot löydät seuraavasta linkistä:

[www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact) .

## Hävittäminen

Käytön päätyttyä tuote on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vahvistamme, että tämä laite on EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2017/745 vaatimusten mukainen.

Voimassa oleva vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy seuraavasta linkistä: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Pont: 04.2022



Lääkinnällinen laite | Yksittäinen potilas - monta kertaa käytettävät laitteet



Valmistaja: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)



PDF:  
[ga.bort.com](http://ga.bort.com)

