

Tack för att du litar på en medicinteknisk produkt från BORT GmbH. Läs den befintliga bruksanvisningen noggrant. Om du har några frågor kan du vända dig till din läkare eller den återförsäljare från vilken du köpte den här medicintekniska produkten.

Syfte

Denna medicintekniska produkt är ett handledsstöd för immobilisering i minst två rörelseriktningar.

Indikationer

Preoperativ, postoperativ, posttraumatisk, degenerativ, karpaltunnelsyndrom (CTS), tenosynovit, perifer nervförlamning.

Kontraindikationer

Perifer arteriell ocklusiv sjukdom (PAOD), lymfdräneringsstörningar, också oklara mjukdelssvullnader distalt från det placerade stödet, sensoriska och cirkulatoriska störningar i den behandlade kroppsdel, hudsjukdomar i den behandlade kroppsdel.

Risker i samband med tillämpningen/viktiga anteckningar



Denna medicintekniska produkt är en förskrivningsbar produkt. Diskutera användningen och användningstiden med din behandlande läkare. Den sakkunniga personalen som du har fått den medicinska utrustningen av kommer att välja lämplig storlek och undervisa dig om hur den ska användas.

- ta bort den medicinska anordningen före radiologiska undersökningar
- inte stänga den för hårt under längre viloperioder, t.ex. när du sover
- vid domningar, lossa den medicinska anordningen och ta bort den vid behov
- vid ihållande besvär, kontakta läkare eller specialiståterförsäljare
- använd den medicintekniska produkten i enlighet med de terapeutiska behoven
- endast använda andra produkter samtidigt efter samråd med din läkare

- gör inga ändringar i produkten
- bär den inte på öppna sår
- använd inte vid intolerans mot något av de använda materialen
- ingen återanvändning - detta medicinska hjälpmedel är avsett för behandling av en patient
- när du bär stödet får du inte använda några krämer eller salvor på eller runtomkring det eftersom de kan förstöra materialet

Anpassningsanvisningar

Stödet kan användas på båda sidorna. Se till att tummen antingen förs genom den vänstra eller den högra tumöppningen, beroende på vilken av sidorna det är. Innan du sätter på skenan ska du böja aluminiumskenorna till önskad form. För in handen i bältet och sätt först metacarpusomkretsen på handryggen med hjälp av de två kardborrebanden. Stäng sedan kardborreknäppningen på underarmen. Slutligen fästs det kringgående bandet på handleden.

Tips: Metacarpusbandet kan lämnas kvar i styrslingorna för att underlätta avlägsnande och anpassning.

Avlägsnande


För att ta bort stödet öppnar du kardborrebanden. Ta tag i skenan i handflatan och dra av skenan över fingrarna. Stäng kardborrebanden för att undvika att kardborreytan slits i förtid.

Materialets sammansättning

Polyamid (PA), polyester (PES), polyuretan (PUR)

Den insydda textieletiketten ger en exakt information om materialets sammansättning.

Information om rengöring

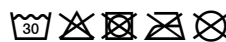

Delikat tvätt 30°C, Blek inte, Torka inte i torktumlare, Stryk inte med strykjärn, Rengör inte kemiskt

Ta bort aluminiumskenan innan du tvättar den. Stäng kardborrebanden för att undvika att andra kläder skadas. Använd inte sköljmedel. Sträck stöden tillbaka till formen och torka i den friska luften.

Garanti

De rättsliga bestämmelserna i det land där du köpte produkten gäller för den köpta produkten. Kontakta din återförsäljare om du tror att du har ett garantianspråk. Rengör produkten innan du lämnar in ett garantianspråk. Om de bifogade bruksanvisningarna inte har följts korrekt kan garantin försämrats eller upphävas. Garantin omfattar inte användning av produkten som är olämplig för indikationen, bristande iakttagande av tillämpningsrisker, instruktioner och obehöriga ändringar av produkten.

Användbar livslängd/Produktens livslängd

Den medicintekniska produktens livslängd bestäms av dess naturliga slitage om den behandlas på rätt sätt och enligt rekommendationerna.

Anmälningsplikt

Om en allvarlig försämring av hälsotillståndet inträffar vid användning av den medicintekniska produkten är du skyldig att meddela fackhandeln eller oss som tillverkare och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Du hittar våra kontaktuppgifter i denna bruksanvisning. Du hittar kontaktuppgifter till den nationella myndigheten i ditt land på följande länk: www.bort.com/md-eu-contact.

Bortskaffande

När användningen upphör måste produkten hanteras i enlighet med motsvarande lokala regler.

Förklaring om överensstämmelse

Vi bekräftar att den här produkten uppfyller kraven i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/745. Du hittar den aktuella förklaringen om överensstämmelse på följande länk: www.bort.com/conformity

Pont: 04.2022



Medicinteknisk utrustning | Enkla patienter - flera användningar



Tillverkare: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com



PDF:
ga.bort.com

