

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

**A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.**

### Termékleírások

Ez az orvostechnikai eszköz egy csuklómerevítő, amely legalább két irányban rögzítheti a mozgási irányokat.

### Javallatok

Preoperatív, posztoperatív, poszttraumás, degeneratív, pl. kéztőalagút szindróma (CTS), tenosynovitis, perifériás idegbénulás.

### Ellenjavallatok

Nyirokelvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanat akár az eszköztől távolabbi, érzékszervi és keringési zavarok az ellátot testrészen, bőrproblémák.

### Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsidbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nincs újrahaználó
- ez a gyógyászati segédeszköz egy beteg kezelésére szolgál
  - a támasz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem a támasztékon, sem a körül, mert tönkretelhet az anyagot

- az eszköz viselése közben kerülje a 40°C feletti hőmérsékletet (pl. forró víz, szauna, forróság járműben)
- fokozott izzadás esetén az eszközt kívül/belül rendszeresen tisztítani kell, majd megszáritva tárolni illetve ismét felhelyezni.

### Felhelyezés

Szállításkor a rögzítő anatómiai előformázott. Az optimális rögzítés érdekében 90°C-ig felmelegíthető (pl. közönséges sütőben) hogy a páciens anatómiai adottságainak legjobban megfeleljen. Ezt kizárólag ortopédiai szaküzlet vagy az orvos végezheti el. A felmelegített eszközt kis lehűtés után az alkarra kell helyezni, és ott a megfelelő formára alakítani. A szűrke hab szigetelő hatású. Ezután zárjuk be a tépőzárat és illesszük az eszközt a páciens karjára. Kis kiterjedésű nyomáspontokat hajszáritóval történő melegítés után szüntethetünk meg. A rögzítő néhány perc múlva lehűl és megtartja a kívánt formát. A hőre lágyuló anyag többször is igazítható a használat során. A csuklórögzítő probléma nélkül használható vízben. Ha sós vízzel érintkezik, utána öblítse le bő friss vízzel.

### Eltávolítás

A merevítő eltávolításához nyissa ki a tépőzárat, és vegye le a kezéről. Zárja le a tépőzárat, hogy elkerülje a tépőzárás felület korai kopását.

### Anyagösszetétel

Poliamid (PA), poliészter (PES), polietilén (PE) A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

### Tisztítási információk



Kézi mosás. Nem fehéríthető. Ne szárítsa szárítógépben. Ne vasolja. Ne tisztítsa vegyileg. Zárja be a tépőzárat, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését. Ne használjon öblítőt. Szárítsa meg a levegőn. Lehetőség van szárítani a hajszáritóval a legalacsonyabb hőfokon.

### Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

### Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

### Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja

### Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

### Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,  
[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)



PDF:  
[ga.bort.com](http://ga.bort.com)

