

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

**A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.**

### Felhasználási javaslat

Ez az orvostechnikai eszköz egy rugalmas, körbefutó ortézis, amely alkalmas a hasi sérv okozta károsodások/panaszok kezelése.

### Javallatok

Sérv, hegygyógyulási elégtelenség hasi izomgyengeség/bénulás.

### Ellenjavallatok

Nyírokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész-duzzanat a segédeszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek a kezelt testrészben.

### Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeket ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a z eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkretelhetik az anyagot

### Felhelyezés

Rögzítse a pelottát tépőzárral az ortézishez, majd helyezze a sérvkapura. A pelotta segíti a sérv áthelyezését (visszanyomását). Erre a célra a pelottát egy behelyezett műanyag mágval megerősítettük, a tépőzár pedig lehetővé teszi, hogy szabadon elhelyezhető legyen a teljes felületen. A sérvkötő rögzítéséhez a beteg vegyen fel megfelelő testhelyzetet, először feküdjön a hátára majd emelje meg a lábait. Úgy, hogy az alsó és felső lábszár derékszöget zárjon be. A sérv ekkor már nem tud kibújni a sérvkapun. A sérvkötőt vezesse körbe a testen és zárja be.


### Eltávolítás

Nyissa ki a tépőzárát és vegye le a sérvkötőt.

### Anyagösszetétel

Poliamid (PA), poliészter (PES), elasztán (EL) A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

### Tisztítási információk

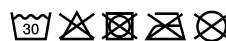

Kíméletes mosás 30 °C Fehérités tilos Szárítógépben szárítani tilos vasalni Vegyileg tilos tisztítani Ne használjon öblítőt. Mosás előtt zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését Nyújtsa vissza eredeti formába, és szárítsa meg levegőn.

### Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

### Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

### Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

### Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745  
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE  
követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az  
alábbi linken találja: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,  
[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)



PDF:  
[ga.bort.com](http://ga.bort.com)

