

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

**A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.**

### Termékjellemzők

Ez egy orvostechnikai eszköz egy rugalmas, körbefutó ortézis, amely alkalmas a mellkas területére nyomást kifejteni és panaszok esetén stabilizálni.

### Javallatok

Hasi beavatkozások után, hasfal gyengeség esetén.

### Ellenjavallatok

Nyirokelvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész-duzzanat a segédeszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek a kezelt testrészben.

### Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeken ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez a orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a z eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkretelhetnek az anyagot

### Felhelyezés

Helyezze a BORT PostOban SOFT Thorax hastámaszt a törzs köré, fogja meg mindkét oldalon, és egyenletesen húzza előre. A bal oldali részt nyomja rá a mellkasra, majd a jobb oldalt húzza meg annyira, hogy össze tudja illeszteni és rögzíteni a tépőzárral.


### Eltávolítás

Nyissa ki a tépőzárát és vegye le a haskötőt.

### Anyagösszetétel

Poliészter (PES), elasztodien/latex (LA), poliamid (PA) )  
A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.  
A termék latexet tartalmaz és allergiás reakciókat válthat ki.

### Tisztítási információk

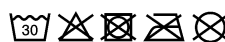

Kímélő mosás 30°C Fehérlítés tilos Szárítógépben szárítani tilos vasalni Vegyileg tilos tisztítani Ne használjon öblítőt. Mosás előtt zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését Nyújtsa vissza eredeti formába, és szárítsa meg levegőn.

### Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

### Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

### Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

### Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

### Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,  
[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)



PDF:  
[ga.bort.com](http://ga.bort.com)

