


# BORT StabiloFix emlékeztető heveder



## Használati útmutató

**REF** 104 600

D104600I2022-04I006 HU I Rev. 01

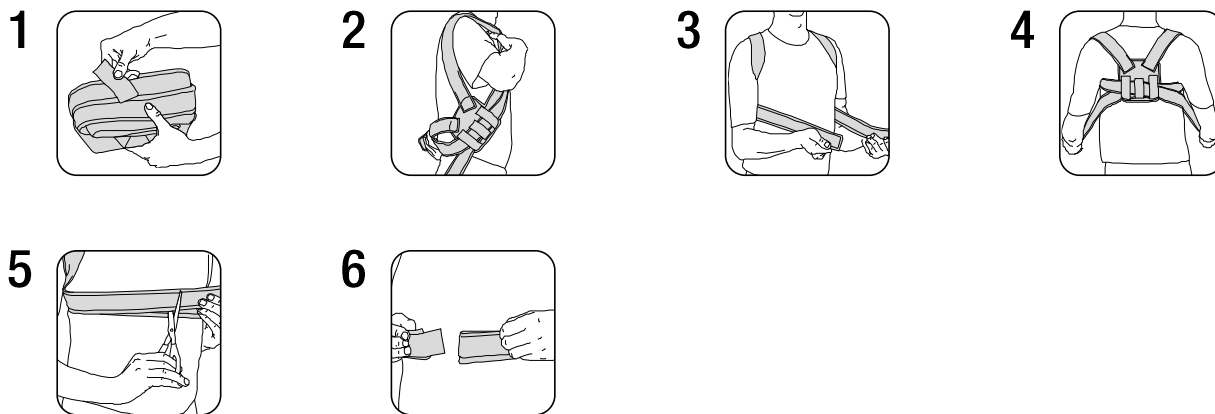

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

**A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.**

### Terméjkellemzők

Ez egy orvostechnikai eszköz egy heveder a mellkasi gerinc kiegyenesítésére ill. túl erős kyphosis ellensúlyozására.

### Javallatok

A mellkasi gerinc kiegyenesítése, tehermentesítése, hanyagtartás

### Ellenjavallatok

Nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan légyrész-duzzanat a segédeszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek a kezelt testrészben.

### Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja

- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- az eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkretelhetik az anyagot

### Felhelyezés

1. Kicsomagolás után távolítsa el a tépőzárás szalagot.  
**Fontos: Ez a tépőzárás szalag később szükséges az eszköz testen történő rögzítéséhez (6. lépés).**
2. Úgy helyezze fel a hevedert, mint egy hátizsákot. Ehhez csúsztassa át a mindkét karját a kék hurkon. Győződjön meg arról, hogy a négyzet alakú tartóelem jó helyen legyen.
3. Vezesse előre a hátsó pántokat keresztirányban.
4. Mindkét pánt meghúzásával húzza meg a hevederrendszert a vállakon.
5. Ha szükséges, ollóval rövidítse le a hevedereket.
6. Zárja be a hevedert mellkasmagasságban az 1. lépésben eltávolított tépőzárás szalag segítségével.

### Eltávolítás

Nyissa ki a tépőzárát és vegye le az emlékeztető hevedert.

## Anyagösszetétel

Fehér szín: poliamid (PA), poliészter (PES), pamut (BW)

Kék szín: poliamid (PA), poliészter (PES)

A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetételt.

## Tisztítási információk



Kímélő mosás 30°C. Fehérités, szárítógépben szárítani, vasalni, vegyileg tisztítani tilos. Ne használjon öblítőt. Mosás előtt zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését. Nyújtsa vissza eredeti formába, és szárítsa meg levegőn.

## Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényekkel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

## Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha megfelelően és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

## Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

## Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,

D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: Veno-Med kft, 1042 Budapest, Árpád út 56.,

[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)



PDF:  
[ga.bort.com](http://ga.bort.com)

