

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékjellemzők

Ez egy orvostechnikai eszköz egy lágyéksérv kötő, amit opcionálisan egy vagy mindkét oldali lágyéksérv reponálására használhatunk.

Javallatok

Egy- vagy kétoldali lágyéksérv reponálása

Ellenjavallatok

Perifériás artériás elzáródásos betegség (PAOD), nyirokelvezetési zavarok, tisztázatlan lágyszövet duzzanatok akár az alkalmazott orvostechnikai eszköztől távol. Érzékszervi és keringési zavarok a z ellátott testrész régiójában, illetve bőrbetegségek a kezelt testrész területén. Latex allergia.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsidbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez a orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a z eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkreteszhetik az anyagot

Felhelyezés

Először helyezze a pelottát a sérvkapura. Ezután vezesse körbe a szíjat a testen a csípőtaraj magasságában (a derék és a csípő között), és rögzítse a kapocccsal. Végül vezesse a combszíjat a lábak közé a comb körül, és zárja le a csípőrészen a hevederre varrt fémcattal. A pelották tépőzárral vannak rögzítve, így egyenként is és tetszés szerint elhelyezhetők. Ez lehetővé teszi az optimális beállítást a sérvkapun.

Eltávolítás

Eltávolításnál lazítsa meg a combszíjakat. Végül akassza ki a kapcsot.

Anyagösszetétel

Viszkóz (CV), elasztodien/latex (LA)

A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

A termék latexet tartalmaz és allergiás reakciókat válthat ki.

Tisztítási információk



Kézi mosás. Fehérités, szárítógépben szárítani, vasalni, vegyileg tisztítani tilos. Ne használjon öblítőt. Mosás előtt zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését. Nyújtsa vissza eredeti formába, és szárítsa meg levegőn.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az
alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

