

**HerniaFix® Spezialbruchband mit  
einstellbarer runder Pelotte**  
**Art. Nr. 110 100**

Bruchbänder sind bei reponierbarem Leistenbruch (d.h. der Bruch kann zurückgedrückt werden) ein seit Jahrzehnten bewährtes Therapiekonzept. Die Pelotte verschließt die Bruchpforte und verhindert somit das Heraustreten und Einklemmen des Bruches



**Gebrauchsanleitung**

Legen Sie das Bruchband im Liegen an. Reponieren Sie den Bruch mit der Hand, anschließend die Pelotte auf der Bruchpforte positionieren. Dann das Band um den Körper auf Höhe des Beckenkamms (zwischen Taille und Hüfte) legen und verschließen.

Die Pelotte kann durch lösen der beiden Schrauben um 45° gedreht und vertikal um 4 cm verschoben werden. Dadurch wird die Anpassung in verschiedenen Positionen und die optimale Einstellung auf die Bruchpforte möglich. Anschließend die Schrauben wieder festziehen.

**Pflegeanleitung**

Bruchband mit lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. An der Luft trocknen lassen. Hitze vermeiden.

**Indikationen**

Reponierbarer Leistenbruch

**Kontraindikationen**

Nicht reponierbarer Leistenbruch, AVK, CVI, inkarzerierte Hernie, Latexallergie.

**Wichtiger Hinweis**

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Bandage lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Größen Umfang Beckenkamm**

small . . . . . 85 - 94 cm  
medium . . . . . 95 - 105 cm  
large . . . . . 106 - 115 cm

**Materialzusammensetzung**

40 % Polyamid  
36 % Polyester  
12 % Elastodien  
12 % Baumwolle

