



HerniaFix® Spezialbruchband mit einstellbarer anatomischer Pelotte Art. Nr. 110 300

Bruchbänder sind bei reponierbarem Leistenbruch (d.h. der Bruch kann zurückgedrückt werden) ein seit Jahrzehnten bewährtes Therapiekonzept. Die Pelotte verschließt die Bruchpforte und verhindert somit das Heraustreten und Einklemmen des Bruches.



Gebrauchsanleitung

Legen Sie das Bruchband im Liegen an. Reponieren Sie den Bruch mit der Hand, anschließend die Pelotte auf der Bruchpforte positionieren. Dann das Band um den Körper auf Höhe des Beckenkamms (zwischen Taille und Hüfte) legen und verschließen. Zuletzt den Schenkelriemen zwischen den Beinen um den Oberschenkel führen und im Bereich der Hüfte an der Lederlasche befestigen.

Die Pelotte kann durch lösen der beiden Schrauben um 45° gedreht und vertikal um 4 cm verschoben werden. Dadurch wird die Anpassung in verschiedenen Positionen und die optimale Einstellung auf die Bruchpforte möglich. Anschließend die Schrauben wieder festziehen.

Pflegeanleitung

Bruchband mit lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. An der Luft trocknen lassen. Hitze vermeiden.

Indikationen

Reponierbarer Leistenbruch

Kontraindikationen

Nicht reponierbarer Leistenbruch, AVK, CVI, inkarzerierte Hernie, Latexallergie.

Wichtiger Hinweis

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Bandage lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Größen	Umfang Beckenkamm
small _____	85 - 94 cm
medium _____	95 - 105 cm
large _____	106 - 115 cm

Materialzusammensetzung

40 % Polyamid
36 % Polyester
12 % Elastodien
12 % Baumwolle



BORT GmbH · Am Schweizerbach 1 · D-71384 Weinstadt-Benzach
Telefon (0 7151) 9 92 00-0 · Telefax (0 71 51) 9 92 00-50
www.bort.com · medical@bort.com

BORT.
Das Plus an
Ihrer Seite.®

