

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékleírások

Ez egy orvostechnikai eszköz a csukló és a hüvelykujj immobilizálására.

Javallatok

Műtét előtti, műtét utáni, pl. hüvelykujj szalag rekonstrukció után, immobilizálás reumás-gyulladásos folyamatok esetén, degeneratív megbetegedések pl. Quervain-kór.

Ellenjavallatok

Perifériás artériás elzáródásos betegség (PAOD), nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanatok akár az alkalmazott orvostechnikai eszköztől távol. Érzékszervi és keringési zavarok a z ellátott testrész régiójában, illetve bőrbetegségek a kezelt testrész területén.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeket ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újrahasonosítható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- az ortézis viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkretesz az anyagot

Felhelyezés

Felhelyezés előtt hajlítsa meg az alumínium síneket a kívánt formára. Nyissa ki az összes tépőzárat és az érintett kezét csúsztassa a merevítőbe, majd helyezze a hüvelykujját az erre a célra szánt részbe. Először zárja le a hüvelykujj és mutatóujj közötti részt, majd a többi is. Végül zárja be a hüvelykujjat rögzítő tépőzárat is.

Eltávolítás

Az ortézis eltávolításához nyissa ki a tépőzárakat. Majd húzza le az ujjakon keresztül a csuklójáról. Zárja be a tépőzárakat, hogy elkerülje a tépőzár felület korai kopását.

Anyagösszetétel

Poliamid (PA), polieszter és elasztán. A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

Tisztítási információk



Kimélő mosás, vegyileg nem tisztítható, nem fehéríthető. Szárítógépben szárítani, vasalni tilos. Ne használjon öblítőt. Mosás előtt távolítsa el az alumínium síneket, és zárja le a tépőzárakat, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését. Nyújtsa vissza eredeti formába, és levegőn szárítsa meg.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az
alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

