

# BORT Stabilo térdbandázs nyitott forma



## Használati útmutató

REF 114 480



## BORT. A nálad lévő plusz.

D114480I2025-01I007 HU I Rev. 01

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

**A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.**

### Terméklejelmzők

Ez az eszköz egy rögzítő a térdízület fiziológiás vezetésének támogatására. Körbefutó tépőzárás rögzítővel és oldalsó vezető sínekkel.

### Javallatok

A térdízület enyhe-közepes laterális instabilitása, gonartrózis, ízületi gyulladás.

### Ellenjavallatok

Trombózisveszély, súlyos varikózis, perifériás artériás elzáródás (PAOD), nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan légnyomás- duzzanat a segédeszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek a kezelt testrészben, latex allergia.

### Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsiBADÁS esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy a szaküzlethez
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra használható
- nincs újrahaználnat, ez a gyógyászati segédeszköz egy beteg kezelésére szolgál
- az ortézis viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkretelhetik az anyagot

### Felhelyezés


Nyissa ki mindkét tépőzárát, és helyezze az ortézist úgy a lábra, hogy a térdkalácsot az ortézis első részén található mélyedés körbevegye. A két részre osztott pelottát, kényelmesen kell elhelyezni a térdkalács mindkét oldalán. Húzza a tépőzárakat a megfelelő szemközti vezetőhurokban keresztül, majd zárja a megfelelő szorosságúra.

### Eltávolítás


Az ortézis eltávolításához nyissa ki a tépőzárakat, és húzza ki őket a vezetőhurokból. Ezután vegye le az orvostechnikai eszközt a lábáról. Zárja be az összes tépőzárát, hogy azok ne okozzanak kárt más ruházaton.

### Anyagösszetétel

Pamut (CO), elasztodien/latex (LA), poliamid (PA), elasztán (EL)  
A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

 A termék latexet tartalmaz és allergiás reakciókat válthat ki.

### Tisztítási információk

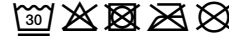

Kímélő mosás 30 °C Fehérités, szárítógépben szárítás, vasalás, vegytisztítás tilos. Mosás előtt távolítsa el az sínket, és zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését. Ne használjon öblítőt. Nyújtsa vissza az eredeti formába, és szárítsa meg a friss levegőn.

### Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

### Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

### Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket, mint gyártót, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI-t). Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja. Az Ön országában illetékes hatóság elérhetőségei a következő linken találhatóak: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

### Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

### Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Pont: 01.2025

 Orvostechnikai eszköz |  Egy beteg – többször felhasználható