

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékjellemzők

Ez a termék egy rugalmas anyagból készült térdtok, amely a pelották segítségével kompressziót fejt ki a térdkalács körül. A combrészen 2 tépőzár segíti a rögzítést.

Javallatok

Ismétlődő ízületi effúzió, arthrosis, ízületi gyulladás és inszalag gyengeség.

Ellenjavallatok

Trombózisveszély, súlyos varikózis, perifériás artériás elzáródás (PAOD), nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész-duzzanat a segédeszköztől távolabb, a kezelt testrészt érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek a kezelt testrészben, latex allergia.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeken ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez a gyógyászati segédeszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a támasz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkretelhetik az anyagot

Felhelyezés

Nyissa ki mindkét tépőzárát, és helyezze az ortézist úgy a lábra, hogy a térdkalácsot az ortézis első részén található mélyedés körbevegye. A két részre osztott pelottát, kényelmesen kell elhelyezni a térdkalács mindkét oldalán. Húzza a tépőzárakat a megfelelő szemközti vezetőhurkokon keresztül, majd zárja a megfelelő szorosságúra.


Eltávolítás

Az ortézis eltávolításához nyissa ki a tépőzárakat, és húzza ki őket a vezetőhurokból. Ezután vegye le az orvostechnikai eszközt a lábáról. Zárja be az összes tépőzárát, hogy azok ne okozzanak kárt más ruházaton.

Anyagösszetétel

Poliamid (PA), elasztodien/latex .A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetételt. A termék latexet tartalmaz és allergiás reakciókat válthat ki.

Tisztítási információk

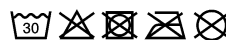

Mosás előtt távolítsa el az ízületi síneket, és zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését. Kímélő mosás 30°C. Fehérlítés, szárítógépben szárítás, vasalás, vegytisztítás tilos. Ne használjon öblítőt. Nyújtsa vissza az eredeti formába, és szárítsa meg a friss levegőn.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igénytel forduljon szakkereskedőjéhez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az
alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu

