

BORT EasyLife

Dispozitiv de prindere rabatabil




Instrucțiuni de utilizare

REF 118 100

BORT. Un plus pentru dumneavoastră.

D118100|2022-10|003 RO | Rev.01

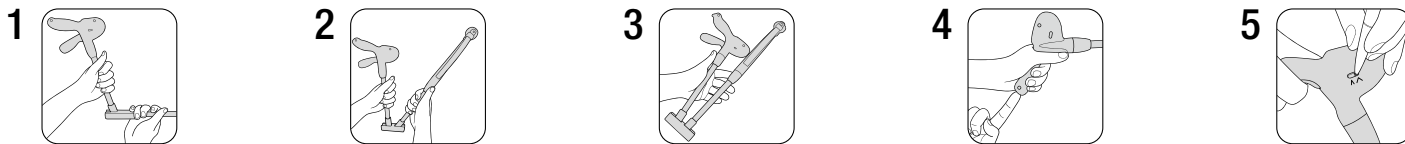

Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni de utilizare. În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă medicului dumneavoastră sau comerciantului de la care ați achiziționat dispozitivul medical.

Destinația de utilizare

Acest dispozitiv medical este un dispozitiv de prindere care este utilizat ca prelungire a brațului pentru apucarea obiectelor.

Indicații

De exemplu, paralizie, limitarea mișcării.

Contraindicații

Deficiențe musculare/disfuncții la nivelul antebrățului/musculaturii mâinii, alergie la nichel.

Riscuri asociate utilizării/indicații importante

Acest dispozitiv medical este un produs disponibil pe bază de prescripție. Discutați despre modul de utilizare și durata utilizării cu medicul dumneavoastră curant. Personalul specializat de la care ați primit dispozitivul medical va selecta dimensiunea adecvată a acestuia și vă va oferi instruire cu privire la modul de utilizare.

- îndepărtați dispozitivul medical înaintea examinărilor radiologice
- utilizați dispozitivul medical conform indicațiilor
- utilizarea simultană a altor produse este permisă numai după consultarea cu medicul dumneavoastră
- nu modificați produsul
- nu utilizați în cazul plăgilor deschise la nivelul podului palmei
- nu utilizați produsul în cazul intoleranței la unul dintre materialele componente, de ex. nichel
- produs nereutilizabil – acest dispozitiv medical auxiliar este destinat tratamentului unui singur pacient
- procedați cu grijă la prinderea obiectelor casante sau fragile

Instrucțiuni de utilizare

Apucați dispozitivul albastru pentru mână și acționați pârghia mobilă cu ajutorul degetelor. Atunci când pârghia este apăsată, cleștele de prindere se închide, iar când pârghia este eliberată, acesta se deschide din nou. În funcție de caracteristicile suprafeței/formă, pot fi ridicate obiecte de până la aprox. 1,5 kg. Dispozitivul de prindere rabatabil BORT EasyLife are o greutate proprie de aprox. 260 g și o lungime de aprox. 75 cm.

Pentru depozitare sau transport, dispozitivul de prindere poate fi rabatat (aprox. 45 cm).

1 Țineți ferm dispozitivul de prindere de partea din spate și rabatați partea din față în sus.

2 Țineți ferm dispozitivul de prindere de partea ridicată și rabatați partea din spate în sus.

3 În cele din urmă, apropiați cele două părți pentru a aduce dispozitivul de prindere în starea de transport.

Pentru depliere, apăsați cele două părți din nou în jos.

Puteți bloca dispozitivul de prindere în stare închisă.

4 Împingeți pârghia până la capăt și apăsați butonul de la capătul mânerului. Pentru deblocare, împingeți din nou pârghia până la capăt.

5 Cursa pârghiei poate fi reglată la nivelul mânerului, după cum urmează:

Apăsați pârghia până la capăt, prindeți un obiect ascuțit (de ex. un pix) și împingeți mecanismul de blocare în poziția dorită:

✓ Poziția: cursă mai lungă a pârghiei – efort scăzut în cazul unei capacități limitate de apucare manuală.

✓ Poziția: cursă mai scurtă a pârghiei – efort obișnuit în cazul unei capacități obișnuite de apucare manuală.

Îndepărtarea produsului

Vă rugăm să depozitați cleștele de prindere la temperatura camerei.

Compoziție

Teavă: Aluminiu

Element de blocare/element de fixare: Inversor Plastic POM (polioximetilenă)

Mâner, piesă terminală: piesă intermediară Plastic ABS (acrilonitril-butadien-stiren)

Arcuri: Crom/nichel

Indicații privind curățarea

Dispozitivul de prindere BORT EasyLife rabatabil poate fi spălat manual cu un detergent pentru articole delicate sau cu o lavetă umedă și nu trebuie să fie uscat prin mijloace mecanice.

Garantie

Se aplică prevederile legale din țara în care a fost achiziționat produsul. Pentru eventuale pretenții de garanție, vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat produsul. Vă rugăm să curățați produsul înaintea formulării unei pretenții de garanție. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate afecta condițiile de acordare a garanției sau poate duce la anularea acesteia. Garanția este exclusă în cazul utilizării produsului în mod contrar indicațiilor, dacă nu sunt luate în considerare riscurile asociate utilizării, în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare, precum și în cazul modificărilor neautorizate la nivelul produsului.

Durata de utilizare/durata de viață a produsului

Durata de viață a produsului este determinată de uzura naturală în cazul utilizării acestuia în mod corespunzător și conform recomandărilor.

Obligația de notificare

Aveți obligația de a notifica distribuitorului specializat de la care a fost achiziționat produsul sau producătorului, precum și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale orice eveniment care duce la agravarea semnificativă a stării dumneavoastră de sănătate în timpul utilizării acestui dispozitiv medical.

Datele noastre de contact sunt menționate în prezentele instrucțiuni de utilizare. Pentru datele de contact ale autorității naționale competentă din țara dumneavoastră, vă rugăm să accesați următorul link: www.bort.com/md-eu-contact.


Eliminare ca deșeu

La finalul duratei de viață, produsul trebuie eliminat ca deșeu conform reglementărilor locale aplicabile.

Declarația de conformitate

Confirmăm faptul că acest produs corespunde cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. Pentru varianta actuală a declarației de conformitate, accesați următorul link: www.bort.com/conformity

Versiunea: 10.2022

Dispozitiv medical |  Un singur pacient – utilizare multiplă

