



## **BORT optionaler 20° Abduktionskeil für BORT OmoFX**

**Art. Nr. 121 160**

### **Indikationen**

Zur Erhöhung der Abduktionsstellung von 30° auf 50° bei Artikel BORT OmoFX (Art. Nr. 121 100).

### **Gebrauchsanleitung**

Zur Erhöhung der Abduktionsstellung des Armes von 30° auf 50° wird der optionale Keil mittels Hakenband auf der dem Körper zugewandten Seite auf BORT OmoFX aufgeklebt. Die Positionierung kann frei variiert werden.

### **Kontraindikation**

Der Artikel „121 160 BORT optionaler Keil für BORT OmoFX“ darf nur in Verbindung mit Artikel BORT OmoFX (Art. Nr. 121 100) zum Einsatz kommen. Sollte eine Abduktionsstellung von weniger als 50° angezeigt werden, darf dieser Artikel nicht an BORT OmoFX adaptiert werden.

### **Pflegeanleitung**

Den Schaumstoffkeil aus der Stofftasche entnehmen. Der Bezug kann in lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand gewaschen werden. Klettverschluss schließen um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. Nach dem Waschen in Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

### **Größenbestimmung**

Nur eine Größe

**rechts oder links angeben**

### **Materialzusammensetzung**

43 % Polyamid  
33 % PUR-Schaum  
24 % Polyester

Das Hilfsmittel ist zur einmaligen Versorgung von einem Patienten konzipiert.

