



## **BORT optionaler 30° Außenrotationskeil für BORT OmoARS**

**Art. Nr. 121 960**

### **Indikationen**

Zur Erhöhung der Außenrotationsstellung von 15° auf 30° bei Artikel BORT OmoARS (Art. Nr. 121 900).

### **Gebrauchsanleitung**

Zur Erhöhung der Außenrotationsstellung des Armes von 15° auf 30° wird der optionale Keil mittels Hakenband zwischen dem Basiskissen und der Armtrage tasche eingeklettet. Die breite Seite zeigt hierbei vom Körper weg. Die Positionierung kann frei variiert werden.

### **Kontraindikation**

Der Artikel „121 960 BORT optionaler Keil für BORT OmoARS“ darf nur in Verbindung mit Artikel BORT OmoARS (Art. Nr. 121 900) zum Einsatz kommen. Sollte eine Außenrotationsstellung von weniger als 30° angezeigt sein, darf dieser Artikel nicht an BORT OmoARS adaptiert werden.

### **Pflegeanleitung**

Den Schaumstoffkeil aus der Stofftasche entnehmen. Der Bezug kann in lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand gewaschen werden. Klettverschluss schließen um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. Nach dem Waschen in Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

### **Größenbestimmung**

Nur eine Größe

### **Materialzusammensetzung**

43 % Polyamid  
33 % PUR-Schaum  
24 % Polyester

Das Hilfsmittel ist zur einmaligen Versorgung von einem Patienten konzipiert.



BORT GmbH · Am Schweizerbach 1 · D-71384 Weinstadt-Benzach  
Telefon (0 7151) 9 92 00-0 · Telefax (0 71 51) 9 92 00-50  
[www.bort.com](http://www.bort.com) · [medical@bort.com](mailto:medical@bort.com)

**BORT.**  
Das Plus an  
Ihrer Seite.®