

# BORT 30°-Außenrotationskeil für OmoARS Zusatzkeil



Gebrauchsanweisung

**REF** 121 960



**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.**

D121960|2024-10|008 DE I Rev. 01

Vielen Dank für das Vertrauen in ein Produkt der BORT GmbH. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel, von dem Sie dieses Produkt erhalten haben.

## Zweckbestimmung

Optionaler Zusatzkeil zur Lagerung in 30° Außenrotation für:  
REF 121 030/121 030 F BORT OmoARS kurz,  
REF 121 900/121 900 F BORT OmoARS und  
REF 121 970/121 970 F BORT OmoARS mit 3-Punkt-Gurt.

## Kontraindikationen

Nur in Verbindung mit BORT OmoARS. Sollte eine Außenrotationsstellung von weniger als 30° angezeigt sein, darf dieser Artikel nicht an BORT OmoARS adaptiert werden.

## Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), Polyester (PES), PUR-Weichschaum (PUR)  
Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingenahten Textiletikett.

## Gebrauchsanleitung

Zur Erhöhung der Außenrotationsstellung des Armes von 15° auf 30° wird der optionale Keil mittels Hakenband zwischen dem Basiskissen und der Armtragetasche eingeklettet. Die breite Seite zeigt hierbei vom Körper weg. Die Positionierung kann frei variiert werden.

## Reinigungshinweise

Schonwaschgang 30 °C Nicht bleichen Nicht im Wäschetrockner trocknen Nicht bügeln Nicht chemisch reinigen  
Den Schaumstoffkeil aus der Stofftasche entnehmen. Der Bezug kann in lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand gewaschen werden. Klettverschluss schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. Nach dem Waschen in Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

## Nutzungsdauer/Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßem Umgang bestimmt.

## Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Stand: 10.2024

Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

