

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékjellemzők

Ez az orvostechnikai eszköz egy habszivacs rögzítő a nyaki gerinc stabilizálására

Javallatok

REF 127260, 127360, 127460, 127660:

Fájdalom a nyaki gerinc régiójában, enyhe ostorcsapás sérülés, torzulás, nyaki gerinc és torticollis műtétek után.

Ellenjavallatok

Nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész-duzzanat a segédeszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek a kezelt testrészben.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeken ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- az eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkreteszhetik az anyagot

Felhelyezés

Nyissa ki a nyaktámaszt, és fogja meg mindkét kezével és tartsa vízszintesen. A tépőzár hajtókája a hátoldalra van rögzítve. Rögzítse a nyaktámaszt úgy, hogy a mélyedés közvetlenül az áll alatt legyen. Ezután vezesse körbe a nyakon, és zárja le hátul a tépőzárral. Úgy rögzítse, hogy támaszt adjon, de ne szorítson. A nyaktámasz puha habanyagból készült, ezért éjszaka is hordható.

Eltávolítás


A nyaktámasz eltávolításához nyissa ki a tépőzárát, majd távolítsa el a merevítőt.

Anyagösszetétel

PUR hab, pamut (BW)

A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetételt.

Tisztítási információk

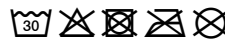

Kímélő mosás 30°C. Fehérités, szárítógépben szárítani, vasalni, vegyileg tisztítani tilos. Ne használjon öblítőt. Mosás előtt zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését. Nyújtsa vissza eredeti formába, és szárítsa meg levegőn.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az
alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 12.2019



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

