

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékleírások

Ez egy orvostechnikai eszköz a csukló és az ujjak immobilizálására.

Javallatok

Preoperatív, posztoperatív, poszttraumás tünetek, carpalis alagút szindróma, tendovaginitis

Ellenjavallatok

Perifériás artériás elzáródás (PAOD), nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanat akár az felhelyezett orvostechnikai eszköztől távolabb, érzékszervi és keringési zavarok a kezelt testtájékon, bőrbetegségek a kezelt testrészen.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsidóbetegség esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeket ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- az eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkretelhetik az anyagot

Felhelyezés

Felhelyezés előtt hajlítsa meg az alumínium sínt a kívánt formára. Nyissa ki a tépőzárat, és helyezze az ortézist az érintett csuklóra. Az alumínium sín a tenyér felületén fut végig. Végül először a hüvelykujj és a mutatóujj között zárja be a tépőzárát, majd a többit is.

Eltávolítás


Az ortézis eltávolításához nyissa ki a tépőzárat. Fogja meg a sínt a tenyér területén, és húzza le az ortézist az ujjakon keresztül a csuklójáról. Zárja be a tépőzárat, hogy elkerülje a tépőzár felület korai kopását.

Anyagösszetétel

Beige szín: poliészter (PES), poliamid (PA), viszkóz (CV), poliuretán-lycra (PUR), elasztán (EL)

A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

Tisztítási információk

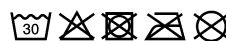

Mosás előtt távolítsa el az alumínium síneket, és zárja le a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését. Kímélő mosás 30°C Fehérlés, szárítógépben szárítani, vasalás, vegyileg tisztítani tilos. Ne használjon öblítőt. Nyújtsa vissza eredeti formába, és szárítsa meg levegőn.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az
alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Lezárva: 04.2022



Orvostechnikai eszköz I Egy beteg – Egyetlen beteg – többszöri
használat



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

