



Kiitos luottamuksestasi BORT GmbH: n lääkinnälliseen laitteeseen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriisi tai asiantuntevaan jälleenmyyjään, jolta ostit tämän lääkinnällisen laitteen.

### Käyttötarkoitus

Tämä lääkinnällinen laite on lonkkasuojahousut, jotka pienentävät kaatumisen yhteydessä lonkkaan tai reisiluun kaulaan kohdistuvan iskun vaikutusta.

### Käyttöaiheet

Eri syistä johtuva kaatumisalttius.

### Vasta-aiheet

Epäselvä pehmytkudosturvotus, aisti- ja verenkiertohäiriöt hoidetulla kehon alueella, ihosairaudet hoidetussa kehon osassa.

### Käyttöön liittyvät riskit / tärkeitä huomautuksia

Asiantunteva henkilöstö, jolta olet saanut lääkinnällisen laitteen, valitsee sopivan koon ja opastaa sinua laitteen käytössä.

- Riisu lääkinnällinen laite ennen radiologisia tutkimuksia.
- Jos havaitset tunnottomuutta, löysää lääkinnällistä laitetta ja riisu se tarvittaessa.
- Toistuvien ongelmien ilmetessä ota yhteys lääkäriin tai asiantuntevaan jälleenmyyjään.
- Käytä lääkinnällistä laitetta käyttöaiheen mukaisesti.
- Käytä muita tuotteita samanaikaisesti vasta neuvoteltuasi asiasta lääkärin kanssa.
- Älä tee muutoksia tuotteeseen.
- Älä käytä tuotetta avohaavojen päällä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin siinä käytetyistä materiaaleista.
- Ei uudelleenkäyttöä. Tämä lääkinnällinen apuväline on tarkoitettu vain yhden potilaan hoitoon.
- Kun käytät lonkkasuojahousuja, älä levitä niiden päälle tai ympärille mitään rasvoja tai voiteita, sillä ne voivat vaurioittaa materiaalia.

### Käyttöohjeet

Pue lonkkasuojahousut yllesi kuten tavalliset housut. Housuihin ommellut taskut varmistavat, että suojakilvet ovat oikeassa paikassa.

Irrota suojakilvet kääntämällä housut nurinpäin. Siirrä sitten taskun yläosassa oleva kansiläppä suojakilven taakse ja vedä suojakilpi pois taskusta.

Kun haluat käyttää suojakilpiä, taita taskun kansiläppä ulos, työnnä suojakilpi leveä puoli edellä taskun pohjaan ja aseta lopuksi kansiläppä vaahtomuovikilven kapean pään päälle. Huomaa, että suojakilven kovera puoli tulee kehoa vasten.

### Poistaminen

Riisu lonkkasuojahousut kuten tavalliset housut.

### Materiaalikoostumus

Puuvilla (CO)

Tarkat materiaalitiedot ovat tuotteeseen ommellussa kangasetiketissä.

### Pesuohjeet

Hienopesu 60 °C Ei saa valkaista Ei saa kuivata kuivausrummussa Ei saa siilittää Ei kemiallista pesua.

Irrota suojakilvet ennen pesua. Housut voidaan pestä pesukoneessa 60 °C: ssa miedolla pesuaineella. Älä käytä huuhteluainetta. Venytä takaisin muotoonsa ja kuivaa raittiissa ilmassa. Pese suojakilvet käsin haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella.

### Takuu

Ostettuun tuotteeseen sovelletaan ostomaan lainsäädäntöä. Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, ota yhteys asiantuntevaan jälleenmyyjään. Puhdista tuote ennen takuuvaatimuksen lähettämistä. Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa heikentää tuotteen takuuta tai mitätöidä sen. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöaiheen vastaisesta käytöstä, käyttöön liittyvien riskien ja käyttöohjeiden huomiotta jättämisestä tai tuotteeseen luvattomasti tehdyistä muutoksista.

### Tuotteen käyttöikä

Lääkinnällisen laitteen käyttöikä määräytyy sen luonnollisen kulumisen mukaan, jos sitä käsitellään asianmukaisesti ja suosituksia noudattaen.

### Ilmoitusvelvollisuus

Jos terveydentila heikkenee vakavasti lääkinnällistä laitetta käytettäessä, asiasta tulee ilmoittaa asiantuntevalle jälleenmyyjälle tai meille valmistajana sekä lääkkeistä ja terveydenhuollon tuotteista vastaavalle sääntelyviranomaiselle (Suomessa Fimea).

Yhteystietomme löytyvät näistä käyttöohjeista. Oman maasi vastaavan viranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

### Hävittäminen

Käytön päätyttyä tuote on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vahvistamme, että tämä laite on EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2017/745 vaatimusten mukainen. Ajantasainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Tila: 10.2023

Lääkinnällinen laite | Yksi potilas – useita käyttökertoja

