

# StabiloForm® Black Edition

Niedertemperatur-Thermoplast

Art. Nr. 344 040

## Bearbeitungsmethoden

Das Material kann im Ofen bei 75 °C erwärmt werden.

Eine Bearbeitung des Materials kann erfolgen wenn nach 3-minütigem Erhitzen bei 75 °C das Material flexibel ist.

## Gebrauchsanweisung

- Nach dem Erhitzen das Material aus dem Ofen nehmen.
- Das Material kann nun direkt mit der Schaumseite zur Haut am Patienten angeformt werden.

## Spezifikations-Tabelle

Elastizität und Verformung	In warmem Zustand elastisch. Kann entsprechend der Körperkontur des Patienten angeformt werden.
Zuschnitt, Verbinden und Befestigung	Das Material kann im kalten und warmen Zustand mit einer Schere oder einem Messer zugeschnitten und mit einer Elektro- oder Handbohrmaschine bei niedriger Drehzahl gebohrt werden. Das Material ist auf der schwarzen Velours-Seite klettfähig! Somit kann ein Klettverschluss beliebig positioniert werden.
Endbearbeitung	Eine schnelle Bearbeitung durch mechanisches Schleifen oder Polieren ist möglich (hierfür bitte niedrige Drehzahl wählen).
Bemerkung	Vermeiden Sie beim Erwärmen den direkten Kontakt des Materials mit den heißen Ofenwänden. Legen Sie das zu erwärmende Material nicht direkt auf den Ofenboden sondern auf einen Gitterrost. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei Erwärmung mit Umluft.
Aufbewahrung	Das Material kühl und dunkel aufbewahren.

