

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékleírások

Ez az orvostechnikai eszköz egy peroneus emelő, amely megtartja a lábfejet az egyéni működési tartományában peroneus bénulás esetén.

Javallatok

Hajlító izmok petyhüdt bénulása, a beteg mozgásképeségének csökkenése, például peroneus bénulás, ágyéki idegyökér károsodás, gyermekbénulás, stroke esetén.

Ellenjavallatok

Trombózisveszély, súlyos varikozitás, perifériás artériás elzáródás, nyirokelvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanat akár az orvostechnikai eszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek az eszközzel kezelt területen.

Alkalmazási kockázatok/fontos megjegyzése

Ez egy orvostechnikai eszköz. Felírható termék. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakképzett személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsidóadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeken ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újrahasonosítható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- az ortézis viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkretelhetik az anyagot

Felhelyezés

Védje a láb nyílt sérülését kötéssel vagy hasonlóval. Ne használja csupasz bőrön, mindig zoknival vagy harisnyával együtt viselje. A BORT hosszú talpú peroneus sín csak cipővel együtt hordható. Helyezze a merevítőt egy cipőbe, és a cipővel együtt húzza fel az érintett lábra. Ügyeljen a nyomásmentes rögzítésre. Ezután zárja le a rögzítőt a lábszáron.

Eltávolítás

Először nyissa ki a rögzítőt a lábszáron. Majd a cipőn. Most csúsztassa ki a lábát az ortézisből. Végül vegye ki a cipőből. Ezután ellenőrizze a lábfejét és a vádlóját, hogy nincs-e benne bőrpír és nyomáspont.

Tipp: Zárja be a tépőzárat, hogy elkerülje a tépőzárás felület korai kopását.

Anyagösszetétel

Poliuretan (PUR) 75 %, Poilethilen (PE) 12 %, Poliamid (PA) 13 %

Tisztítási információk



Kézi lemosás. Fehériteni nem szabad, szárítót ne használjunk, ne vasaljuk, vegytisztítás tilos.

Öblítőt ne használjunk. Zárja be a tépőzárat, hogy elkerülje a tépőzárás felület korai kopását.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha szakszerűen és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az
alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Lezárva: 12.2019



Orvostechnikai eszköz I Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

