

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

**A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.**

### Termékleírások

Ez az orvostechnikai eszköz egy peroneus emelő, amely megtartja a lábfejet az egyéni működési tartományában peroneus bénulás esetén.

### Javallatok

Hajlító izmok petyhüdt bénulása, a beteg mozgásképeségének csökkenése, például peroneus bénulás, ágyéki idegyökér károsodás, gyermekbénulás, stroke esetén.

### Ellenjavallatok

Trombózisveszély, súlyos varikozitás, perifériás artériás elzáródás, nyirokelvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanat akár az orvostechnikai eszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek az eszközzel kezelt területen.

### Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzése

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakképzett személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsidbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeken ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újrahasonosítható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- az ortézis viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkretelhetik az anyagot

### Felhelyezés

Védje a láb nyílt sérülését kötéssel vagy hasonlóval. Ne használja csupasz bőrön, mindig zoknival vagy harisnyával együtt viselje. A BORT hosszú talpú peroneus sín csak cipővel együtt hordható. Helyezze a merevítőt egy cipőbe, és a cipővel együtt húzza fel az érintett lábra. Ügyeljen a nyomásmentes rögzítésre. Ezután zárja le a rögzítőt a lábszáron.

### Eltávolítás

Először nyissa ki a rögzítőt a lábszáron. Majd a cipőn. Most csúsztassa ki a lábát az ortézisből. Végül vegye ki a cipőből. Ezután ellenőrizze a lábfejét és a vádliját, hogy nincs-e benne bőrpír és nyomáspont.

**Tipp:** Zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a tépőzárás felület korai kopását.

### Anyagösszetétel

Polipropilén (PP) 70 %, Poliethilén (PE) 30 %

### Tisztítási információk



Kézi mosás, fehéríteni nem szabad, szárítót ne használjunk, ne vasaljuk, vegytisztítás tilos.

### Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

### Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha szakszerűen és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

### Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

### Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745  
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE  
követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az  
alábbi linken találja: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Lezárva: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,  
[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)



PDF:  
[ga.bort.com](http://ga.bort.com)

