


BORT Valco Hallux Valgus sín



Használati útmutató

REF 930 010

D930010|2022-04|004 HU I Rev. 01

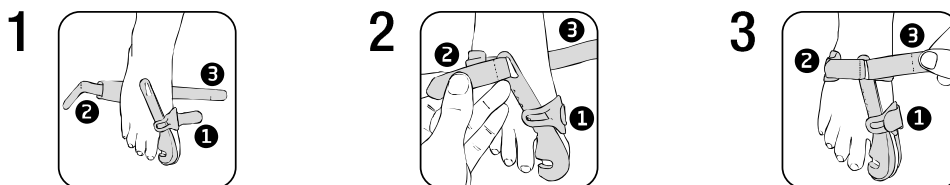

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékjellemzők

Ez az orvosi eszköz egy hallux valgus korrekciós merevítő a nagylábujj x-hibás helyzetének korrekciójára. Az állítható rögzítő lehetővé teszi a korrekciós nyomás fokozatmentes, egyedi beállítását.

Javallatok

Hallux valgus, hallux műtét után a kezelés sikerének biztosítása érdekében, posztoperatív teher mentesítés.

Ellenjavallatok

Trombózisveszély, súlyos varikózis, perifériás artériás elzáródás (PAOD), nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész-duzzanat a segédeszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek a kezelt testrészben.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- éjszakai viselés esetén úgy állítsa be, hogy ne akadályozza a keringést
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja

- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez a gyógyászati segédeszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a támasz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkretelhetik az anyagot
- a BORT Valco Hallux valgus sint többnyire éjszaka viselik

Felhelyezés

Fontos: A sín cipőben nem hordható! Alkalmazás előtt: Lazítsa meg a nagylábujj tépőzárját (1. sz.). Nyissa ki teljesen a láb hátsó részén található rögzítőket (2. és 3. sz.)

1. Csúsztassa a BORT Valco Hallux valgus sint a nagyujj és a második lábujj közé. A párnázott rész a nagylábujj gömbizület belsejét veszi körül, és egy síkban van a nagylábujj gömbizület hegyével. A vezetőpánt (1. sz.) a lábközépcsont ízületen záródik, és a fogazott sín segítségével igény szerint egyedileg állítható.
2. Finoman húzza meg a lábfej külső oldalán lévő nem elasztikus pántot (2. sz.), úgy, hogy bármilyen beállítás érezhető és látható legyen.
3. Az eszköz stabil rögzítéséhez zárja be a láb belső oldalán lévő rugalmas pántot (3. sz.). Ha szükséges, a nem elasztikus pánttal kicsit még feszítse meg. (2. sz.).

Eltávolítás

A Hallux valgus sín eltávolításához nyissa ki teljesen a nem elasztikus rögzítést (2. sz.) és lazítsa meg a vezetőpántot (1. sz.). Végül távolítsa el a Hallux valgus sint előrefelé a nagylábujj felett. Tipp: Zárja be a tépőzárakat, hogy elkerülje a tépőzárás felület korai kopását.

Anyagösszetétel

94 % Poliamid (PA), 3 % Poliészter (PES), 3 % Elasztán (EL)

Tisztítási információk



Kézi mosás. Fehérités, szárítógépben szárítás, vasalás, vegytisztítás tilos. Ne használjon öblítőt. Nyújtsa vissza az eredeti formába, és szárítsa meg a friss levegőn. Mosás előtt zárja be a tépőzárát, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényvel forduljon szakkereskedőjéhez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Lezárva: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu

