



### BORT. A nálad lévő plusz.

D930050|2024-10|006 HU | Rev. 01

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szakújszertelhez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

#### A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

#### Termékjellemzők

Ez egy orvostechnikai eszköz, egy rezgéscsillapító/sarokpárna, amely helyi nyomáscsökkentést tesz lehetővé a láb hátsó részén lépés közben. A rezgéscsillapítók viskoelasztikus anyagból állnak, és lapos vagy kagyló formájú kivitelben kaphatók. A rezgéscsillapítók használata többnyire része az orvosok által végzett terápiás kezelési intézkedéseknek.

#### Javallatok

Lábfájás, achillodynia, Haglund-deformitás, a boka-, a térd- és a csípőizület ütközésének csillapítása osteoarthritisben

#### Ellenjavallatok

Érzékszervi és keringési zavarok a z ellátott testrészt régiójában, illetve bőrbetegségek a kezelt testrészt.területén.

#### Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsiabbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeket ne viselje
- ne használja valamelyik felhasználó anyag intoleranciája esetén
- nem újra használható
- nincs újrahazsnálat, ez a gyógyászati segédeszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a támasz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkretelhetik az anyagot

#### Felhelyezés

Helyezze a szilikon sarokpárnát a cipőjébe úgy, hogy azok illeszkedjenek a cipő sarkához. Itt az oldalsó peremnek felfelé kell mutatnia. A puha anyag ideálisan alkalmazkodik a sarokrész kontúrjához, és biztonságosan tapad, csúszás nélkül.

#### Eltávolítás

A nap végén vegye ki a szilikon sarokpárnát a cipőből, és tárolja tiszta helyen, hogy minimalizálja a szennyeződést és a kellemetlen szagokat.

#### Anyagösszetétel

100 % Szilikon (SI)

#### Tisztítási információk

Ha szükséges, szappannal és langyos vízzel megtisztíthatja a szilikon sarokpárnát. Majd szárítsa meg friss levegőn. Igény esetén a felső oldal enyhén bepöderezhető.

#### Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényt forduljon szakkereskedőjéhez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

#### Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

#### Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szakújszertel vagy bennünket, mint gyártót, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI-t). Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja. Az Ön országában illetékes nemzeti hatóság elérhetőségei a következő linken találhatóak: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

#### Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

#### Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Pont: 10.2024

Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható

