

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékleírások

Ez egy orvostechnikai eszköz, egy rezgéscsillapító/sarokpárna, amely helyi nyomáscsökkentést tesz lehetővé a láb hátsó részén lépés közben. A rezgéscsillapítók viszkoelasztikus anyagból állnak, és lapos vagy kagyló formájú kivitelben kaphatók. A rezgéscsillapítók használata többnyire része az orvosok által végzett terápiás kezelési intézkedéseknek.

Javallatok

Saroksarkantyú, achillodynia, Haglund-féle deformitás, rezgéscsillapítás boka-, térd- vagy csípőízületi arthrosis esetén.

Ellenjavallatok

Érzékszervi és keringési zavarok a z ellátott testrész régiójában, illetve bőrbetegségek a kezelt testrész területén.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsidóság esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeket ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez a gyógyászati segédeszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a támasz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkreteszheti az anyagot

Felhelyezés

Helyezze a szilikon sarokpárnákat a cipőjébe úgy, hogy azok illeszkedjenek a cipő sarkához. Itt az oldalsó peremnek felfelé kell mutatnia. A puha anyag ideálisan alkalmazkodik a sarokrész kontúrájához, és biztonságosan tapad, csúszás nélkül.


Eltávolítás

A nap végén vegye ki a szilikon sarokpárnát a cipőből, és tárolja tiszta helyen, hogy minimalizálja a szennyeződést és a kellemetlen szagokat.

Anyagösszetétel

100 % Szilikon (SI)

Tisztítási információk

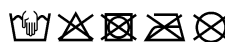

Ha szükséges, szappannal és langyos vízzel megtisztíthatja a szilikon sarokpárnákat. Majd szárítsa meg friss levegőn. Igény esetén a felső oldal enyhén bepuderezhető.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényekkel forduljon szakkereskedőjéhez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

