

BORT Pedisoft lábujj alátámasztó



Használati útmutató

REF 107 100

D107100I2021-05I002 HU



Funkció

Az alápárnázó egy nyomáscsökkentő gél párna, mely a lábfej teljes szélességében azonnali segítség a helytelen tartás miatt kialakult fájdalom ellen.

Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Bujtassa a lábujjat a párnán kialakított hurokba úgy, hogy a párna a lábai alá illeszkedjen.

A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló
- nagyon puha és sima
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni, és végül **puderezze** be.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

