

BORT Pedisoft lábfej alátámasztó

Használati útmutató

REF 107 120



D107120|2021-05|002 HU



Funkció

Enyhíti a lábfej fokozott terhelését magas sarkú cipő viselésekor. Az alátámasztó a nyomás enyhítésére szolgál, biztonságos és csúszásmentes tartást biztosít.

Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. A betéteket a jobb oldali R és baloldali L jelölés szerint felfelé csúsztassa bele a cipőbe. Optimális tartást biztosít. Ne púderezze be a talpbetét alsó oldalát.

A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló
- nagyon puha és sima
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni, és végül **puderezze** be.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

