


BORT Pedisoft kisujj védő

Használati útmutató



REF 107 130

D107130I2021-05I002 HU

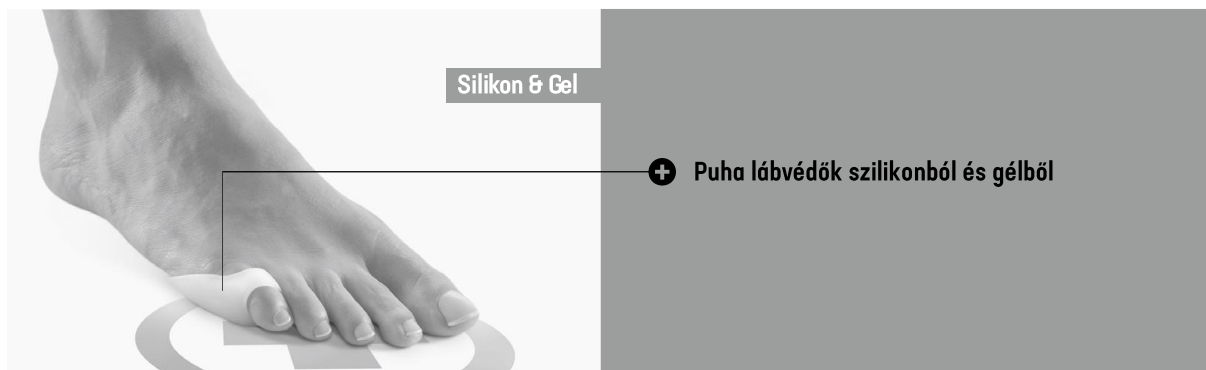

Funkció

A puha anyag tökéletesen alkalmazkodik a kis lábujj kortúrájához anélkül, hogy elcsúszna és véd a nyomás ellen. Megakadályozza hogy harisnyák, zoknik kidörzsöljék a bőrt.

Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Csúsztassa a kis lábujjat az erre a célra kialakított hurokba úgy, hogy az eszköz illeszkedjen az érzékeny részre.

A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló
- nagyon puha és sima
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni, és végül **púderezze** be.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

