

BORT Pedisoft lábujj terpesztő bütyök védővel



Használati útmutató

REF 107 140

D107140I2021-05I002 HU



Funkció

Elválasztja az eldeformálódott és egymásra hajló láb ujjakat. Védi őket a bőrkeményedés és tyúkszem kialakulásától.


Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Húzza a nagy lábujjára úgy, hogy az elválasztó az ujjai közé kerüljön, a bütyökvédő pedig felfeküdjön a különösen érzékeny bütyök részre. A lágy anyag optimálisan illeszkedik a láb kontúrájára, odatapad, így meggátolva az esetleges elcsúszást.

A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- nagyon puha és sima
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat

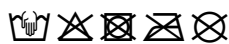

Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.