

# BORT Pedisoft lábujj terpesztő dupla gyűrűvel



## Használati útmutató

**REF** 107 150

D107150I2021-05I002 HU



### Funkció

Elválasztja az eldeformálódott és egymásra hajló láb ujjakat. A kettős gyűrű, két lábujjra húzva biztos tartás ad.

### Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Húzza a gyűrűket két lábujjára, hogy azok elkülönüljenek egymástól.

### A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- nagyon puha, lágy
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

### Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,  
[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)



PDF:  
[ga.bort.com](http://ga.bort.com)

