

BORT Pedisoft lábujj terpesztő gyűrűvel

Használati útmutató

REF 107 630



D107630I2021-05I002 HU



Funkció

Elválasztja az eldeformálódott és egymásra hajló láb ujjakat. A lábujjra húzott gyűrű biztos tartás ad.

Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Húzza a gyűrűt a második lábujjára úgy, hogy az elválasztó a nagy lábujj és második ujj közé kerüljön, hogy azokat elválassza.

A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- nagyon puha, lágy
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

