


BORT Pedisoft gél ujjvédő

Használati útmutató



REF 107 640

D107640I2021-05I002 HU

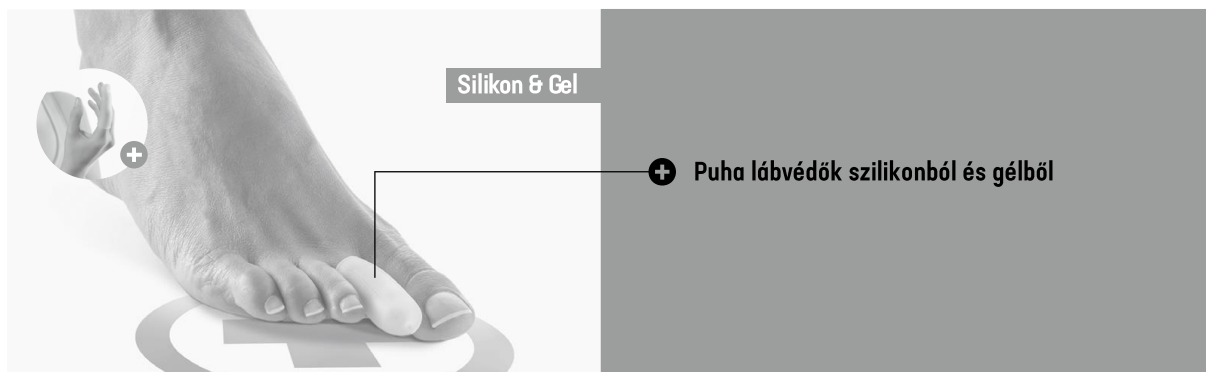

Funkció

A kéz és lábujjak nyomásának enyhítésére. Kényelmesen felhelyezhető.

Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Húzza a sapkát az érintett ujjra. A bőr irritáció elkerülése érdekében naponta csak 3-4 órát viselje.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni, és végül púderezze be.

Fontos megjegyzések

Ne használja nyílt sebekre. Cukorbetegség, gyulladás, érrendszeri betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával! Ha bőrirritáció vagy keringési zavar lép fel azonnal hagyja abba a termék használatát, és szükség esetén forduljon orvoshoz.



Gyártó: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.