


BORT Pedisoft gél lábujj alátámasztó



Használati útmutató

REF 107 680

D107680I2021-05I002 HU

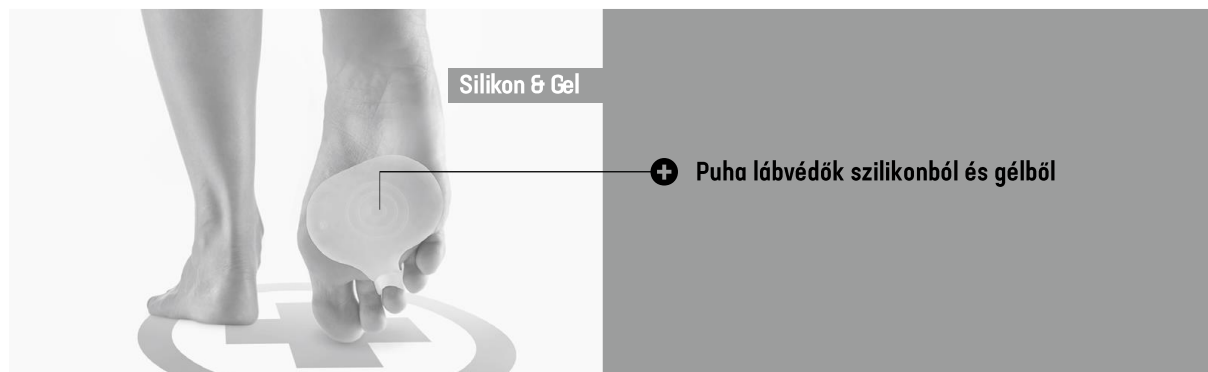

Funkció

Enyhíti a lábfej fokozott terhelését lábujjra húzott gyűrű biztos tartás ad.

Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. A rögzítő gyűrű stabilan tartja helyén a párnát. Az eszközt a megfelelő oldali lábra középső ujjára (R=jobb, L=bal) úgy helyezzük fel, hogy a kialakított körkörös struktúra a cipő talpa felé mutasson.

A gél előnyei

- tartós és kopásálló
- nagyon puha, lágy optimálisan osztja el a nyomást
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni.

Fontos megjegyzések

Ne használja nyílt sebekre. Cukorbetegség, gyulladás, érrendszeri betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával! Ha bőrirritáció vagy keringési zavar lép fel azonnal hagyja abba a termék használatát, és szükség esetén forduljon orvoshoz.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.