

BORT Pedisoft lábujjterpesztő, textil



Használati útmutató

REF 137 010

D137010I2021-05I002 HU



Funkció

A lábujj/kézujj védő kényelmes viselet az érintett ujjon.
Segíti a nyomás elosztást

Alkalmazás

Úgy húzza fel, hogy az érintett gél réteg az érzékeny felületet fedje. Az irritáció elkerülése érdekében napi 3-4 órát tartózkodjon a viselésétől.

A gél előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- higiénikus, mosógépben mosható 30 °C
- kényelmes viselet
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni.

Fontos megjegyzések

Ne használja nyílt sebekre. Cukorbetegség, gyulladás, érrendszeri betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával! Ha bőrirritáció vagy keringési zavar lép fel azonnal hagyja abba a termék használatát, és szükség esetén forduljon orvoshoz.



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu