

BORT Pedisoft bűtyökvédő, textil

Használati útmutató

REF 137 030



D137030I2021-05I002 HU



Funkció

Tehermentesíti a bűtyköt azáltal, hogy az érintett részen kipárnázza. A textil huzat biztosítja a megfelelő és tartós elhelyezést a nyomásnak kitett ponton.

Alkalmazás

A textil bűtyökvédő mindkét lábon viselhető, úgy húzza fel mint egy zoknit. Az optimális hatás elérése érdekében, viseljen fölötte zoknit.

A gél előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- higiénikus, mosógépben mosható 30 °C
- kényelmes viselet
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Fontos megjegyzések

Ne használja nyílt sebekre. Cukorbetegség, gyulladás, érrendszeri betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával!



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu

