


BORT Pedisoft lábujj sapka, textil



Használati útmutató

REF 137 050

D137050I2021-05I002 HU

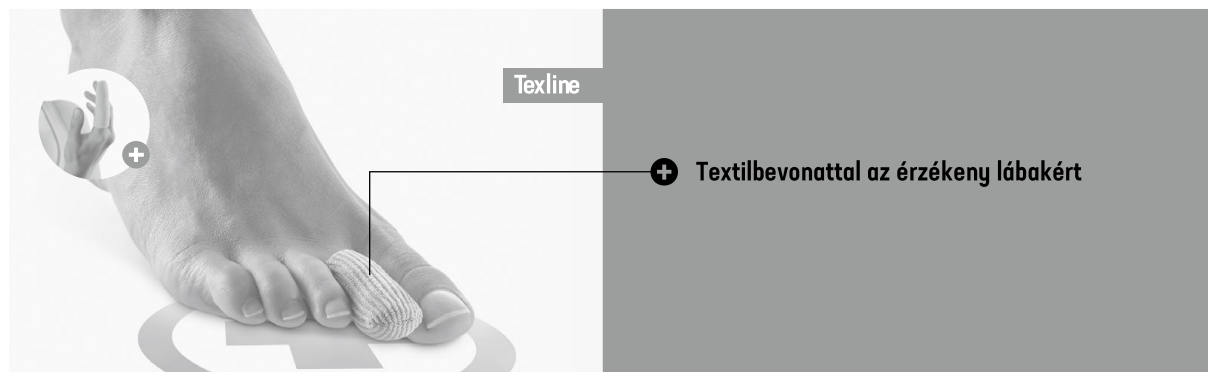

Funkció

A kéz és lábujjak nyomásának enyhítésére. Kényelmesen felhelyezhető.

Alkalmazás

Vágja le a kívánt hosszúságúra és húzza fel a fájdalmas ujjra.

A bőr irritáció elkerülése érdekében naponta csak 3-4 órát viselje. Használat előtt púderezze be a dobozba csomagolt púderral.

A gél előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- higiénikus, mosógépben mosható 30 °C
- kényelmes viselet
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Fontos megjegyzések

Ne használja nyílt sebekre. Cukorbetegség, gyulladás, érrendszeri betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával! Ha bőrirritáció vagy keringési zavar lép fel azonnal hagyja abba a termék használatát, és szükség esetén forduljon orvoshoz.



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu