


BORT Pedisoft ujjalátamasztó, textil



Használati útmutató

REF 137 100

D137100I2021-05I002 HU

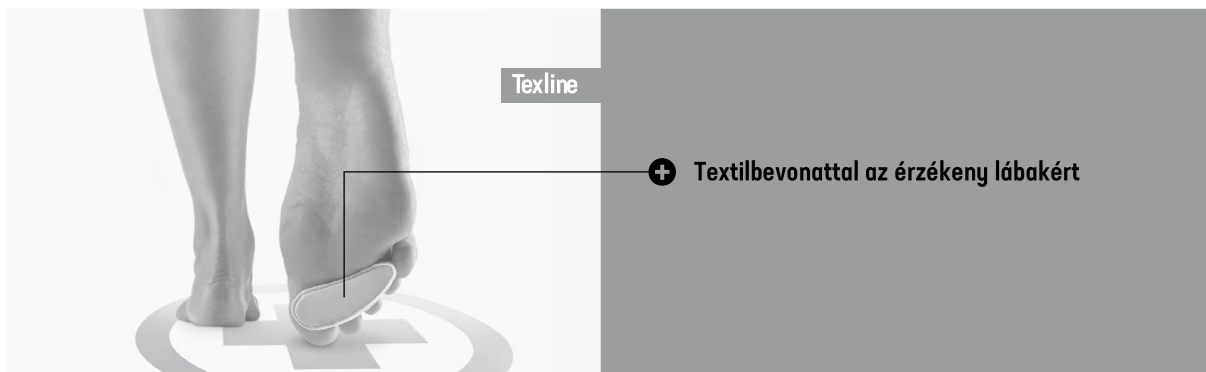

Funkció

Az alápárnázó egy nyomáscsökkentő gél párna, mely a lábfej teljes szélességében azonnali segítség a helytelen tartás miatt kialakult fájdalom ellen. A textil huzat biztosítja a megfelelő és tartós elhelyezést a nyomásnak kitett ponton.

Alkalmazás

Használja tiszta száraz bőrre. Bujtassa a lábujjat a párnán kialakított hurokba úgy, hogy a párna a lábai alá illeszkedjen.

A gél előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- higiénikus, mosógépben mosható 30 °C
- kényelmes viselet
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Fontos megjegyzések

Ne használja nyílt sebekre. Cukorbetegség, gyulladás, érrendszeri betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával.



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

 Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu

