

# BORT Generation

## Hallux valgus-lahas



Kasutusjuhend

REF 215 930

BORT. Kasu teie poolel.

D215930|2022-04|007 ET | Rev.01



Täname BORT GmbH meditsiiniseadme usaldamise eest. Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Küsimuste korral pöörduge oma arsti või edasimüüja poole, kelle käest selle meditsiiniseadme saite.

### Otstarve

See meditsiiniseade on korrigeeriv suure varba nuki lahas ja see korrigeerib suure varba vale X-asendit. Reguleeritav sulgur võimaldab korrektsioonisurve sujuvat ja individuaalset reguleerimist.

### Näidustused

Suure varba nukk, pärast suure varba nuki operatsiooni ravitulemuse säilitamiseks, operatsiooniajaks kapsli koormuse vähendamiseks.

### Vastunäidustused

Tromboosioht, kaugelearenenud veenilaiendid, perifeerne arterite oklusioonhaigus, lümfiringehäired, ka ebaselge põhjusega pehmete kudede tursed paigaldatud abivahendist eemal asuvates kehaosades, sensoorsed ja verevarustushäired vastavas keha piirkonnas, nahahaigused vastaval kehaosal.

### Kasutamise seotud ohud/olulised juhised ⚠

Käesolev meditsiiniseade on toode, mis on teataval juhtudel väljastatav retsepti alusel.

Konsulteerige oma arstiga kasutamise ja kestuse suhtes. Sobiva suuruse valib ja toote kasutamist juhendab eripersonal, kellelt meditsiiniseadme saite.

- eemaldage meditsiiniseade enne radioloogilisi uuringuid
- kui määratud on kandmine öösel, vältige vereringe mõjutamist
- tundetuse korral lõdvendage meditsiiniseadet või võtke see ära
- kaebuste püsimise korral võtke ühendust arsti või edasimüüjaga
- kasutage meditsiiniseadet näidustuste kohaselt
- muude toodete samaaegne kasutamine üksnes kokkuleppel teie arstiga
- ärge muutke toodet
- mitte kanda lahtistel haavadel
- ärge kasutage mõne kasutatud materjali talumatuse korral
- ei ole taaskasutatav – käesolev abivahend on mõeldud ühe patsiendi jaoks
- ortoosi kandmise ajal: ärge kasutage paigaldatud abivahendi piirkonnas lokaalselt kreemega salve, see võib materjali hävitada.
- ortoosi võib kanda päeval või öösel
- ortoosi võib kanda jalatsi sees.

### Paigaldusjuhised

- 1 Avage BORTi Hallux valgus'e lahas Generation sulgurid täielikult. Koormust vähendav padjand on bandaažile kinnitatud takjakinnisega ja see on vastavalt vajadusele vabalt paigutatav.
- 2 Valige stabiliseerimiselement ja lükake see täielikult selleks ettenähtud veluurtaskusse. Staatiline ja dünaamiline kasutusviis, sõltuvalt konfiguratsioonist: 1. spiraalvedru (painduv), 2. tugi (jäik).
- 3 Järgmise sammuna tõmmake bandaaž üle suure varba (hallux). Seejuures peaks koormust vähendav padjand olema täpselt suure varba põhiligese kõrgusel.
- 4 Kinnitage BORTi Hallux valgus-lahas Generation takjakinnis ühtlase tõmbega üle jalalaba külje. Pöörake tähelepanu meeldivale tundele kandmisel.
- 5 Tõmmake külgmist korrigeerivat rihma mõõdukalt kanna suunas ja sulgege takjakinnis, selle tulemuseks peaks olema nähtav suure varba nuki (suure varba kõver asend) korrigeerimine.

Kandmiskestus on igal patsiendil erinev ja sõltub olemasolevatest anatoomilistest tingimustest. Eemaldage ortoos regulaarselt ning kontrollige naha pinda punetuse või muljutiste suhtes.

### Eemaldamine

Hallux valgus'e lahas BORT Generation eemaldamiseks avage ortoosi ümbrise ja külgmise korrigeeriva rihma takjakinnis.

**Nõuanne:** Takjapinna enneaegse kulumise vältimiseks sulgege takjakinnised.

### Koostis

Polüamiid (PA), elastaan (EL).

Materjali täpset koostist saate vaadata sisseõmmeldud tekstiilietiketilt.

### Puhastamisjuhised

☑️ Örn pesutsükkel 30 °C ☒ Mitte pleegitada ☒ Mitte kuivatada pesukuivatis  
☒ Mitte triikida ☒ Mitte keemiliselt puhastada

Ärge kasutage pesuloputusvahendit. Venitage vormi ja laske õhu käes kuivada.

Võtke stabiliseerimiselement välja. Sulgege takjakinnised, et vältida teiste pesuesemete kahjustamist.

### Garanti

Omandatud tootele kehtivad selle riigi seadusesätted, kus olete toote hankinud.

Garantiinõude kahtluse korral pöörduge oma edasimüüja poole. Puhastage toodet enne garantiinõude esitamist. Kui kasutusjuhendi juhiseid ei järgitud piisavalt, võib see mõjutada garantiid või selle tühistada. Garantiioigus on välistatud muul kui näidustuste kohasel kasutamisel, kasutamise seotud ohtude, juhiste eiramisel, samuti toote omavoliliste muudatuste tegemisel.

### Toote kasutusaja

Meditsiiniseadme kasutusea määrab loomulik kulumine asja- ja nõuetekohasel kasutamisel.

### Teatamiskohustus

Kui meditsiiniseadme kasutamisel halveneb tervislik seisund olulisel määral, teavitage sellest oma edasimüüjat või meid kui tootjat ning ka Eesti Terviseametit. Meie kontaktandmed leiате käesolevast kasutusjuhendist. Pädeva riikliku asutuse kontaktandmed teie riigis saate järgmiselt veebiaadressilt: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

### Jäätmekäitlus

Pärast kasutamise lõppu tuleb toode vastavalt kohalikele nõuetele suunata jäätmekäitlusesse.

### Vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et käesolev toode vastab EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) 2017/745 nõuetele. Kehtiva vastavusdeklaratsiooni leiате järgmiselt lingilt: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Seisuga: 04.2022

Meditsiiniseade | Ühel patsiendil korduvalt kasutatav

