



Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékjellemzők

Ez az orvosi eszköz egy hallux valgus korrekciós merevítő a nagylábujj x-hibás helyzetének korrekciójára. Az állítható rögzítő lehetővé teszi a korrekciós nyomás fokozatmentes, egyedi beállítását

Javallatok

Hallux valgus, hallux műtét után a kezelés sikerének biztosítása érdekében, posztoperatív teher mentesítés.

Ellenjavallatok

Trombózisveszély, extrém varikózis, perifériás artériás elzáródás betegség (PAOD), nyirokvezetési zavarok, szintén tisztázatlan lágyrész az elhelyezett segédeszköztől távolabbi duzzanat, érzékszervi és keringési rendellenességek a kezelt test régiójával, bőrbetegségek a kezelt testrész.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- éjszakai viselés esetén úgy állítsa be, hogy ne akadályozza a keringést
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el

- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez a gyógyászati segédeszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a támasz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt, mert tönkretelhetik az anyagot
- az ortézis éjjel nappal viselhető
- cipőben is viselhető

Felhelyezés

1. Nyissa ki teljesen a BORT Generation Hallux Valgus Splint rögzítőelemeit. A tehermentesítő pelotta tépőzárral van rögzítve, és szükség szerint szabadon elhelyezhető.
2. Válassza ki a stabilizáló elemet, és csúsztassa be teljesen az erre a célra szolgáló velurzebebe. Statikus és dinamikus alkalmazási lehetőségek, konfigurációfüggő:
 1. Spirálrugó (rugalmas), 2. Sín (merev).
3. A következő lépésben húzza a sít nagylábujjra (hallux). Itt a tehermentesítő pelottának pontosan ugyanazon a szinten kell lennie, mint a nagylábujj gömbözület.
4. Zárja be a BORT Generation Hallux Valgus sít a lábfej fölött egyenes húzással. Ügyeljen rá, hogy az eszköz viselése kényelmes legyen.

- 5.** Húzza az oldalt elhelyezett korrekciós szalagot a sarok felé fokozatos húzással. A korrekciónak láthatónak kell lenni. (nagy lábujj ferde állása javuljon)

A viselési idő betegenként változhat, a fennálló anatómiai körülmények miatt. Vegye le a sánt rendszeres időközönként, és ellenőrizze a bőrpír vagy nyomáspontok megjelenését.

Eltávolítás

A BORT Generation Hallux Valgus sín eltávolításához nyissa ki a tépőzárát és az oldalsó korrekciós szalagot. Tipp: Zárja le a tépőzárakat, hogy elkerülje a tépőzárak felület korai kopását.

Anyagösszetétel

Poliamid (PA), elasztán (EL).

A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

Tisztítási információk



Kímélő mosás. Fehérités, szárítógépben szárítás, vasalás, vegytisztítás tilos. Ne használjon öblítőt. Nyújtsa vissza az eredeti formába, és szárítsa meg a friss levegőn. Vegye ki a stabilizáló elemeket. Mosás előtt zárja be a tépőzárakat, hogy elkerülje a többi ruhadarab sérülését.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényvel forduljon szakkereskedőjéhez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelési nyilatkozatot az alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1, D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56., www.venomed.hu

