

# Verwendung der JumpStart Zehenpolster (optional mit Zehen- Abduktions- Band)



In den nächsten Schritten wird beschrieben, wie Sie die Zehenpolster richtig positionieren und befestigen, optional auch mit Zehen - Abduktions - Band.

1



Die JumpStart Orthese anlegen und Klettverschlüsse schließen, dann die Zehen seitlich anheben und das Zehenpolster zwischen Orthese und Zehen schieben. Schutzfolie nicht entfernen!

2

Positionieren Sie das Zehenpolster so, dass ein kleiner Spalt zwischen den Metatarsal - Köpfchen und dem Zehenpolster bleibt. *Bitte den Längenzuwachs des Fußes (bei Belastung durch Körpergewicht) berücksichtigen.*



3



## Position des Zehenpolsters festlegen und markieren:

- **Ist das Zehenpolster länger als die JumpStart Orthese:** Den Orthesenrand als Referenzlinie auf die Unterseite des Polsters übertragen.
- **Ist das Zehenpolster kürzer als die JumpStart Orthese:** Das distale Ende des Zehenpolsters als Richtlinie für die Orthesenlänge nutzen.


4



## Markierung der Kontur

Den endgültigen Verlauf des Zehenpolsters von oben markieren. *Eine Daumenbreite als Maßzugabe, ist bei zu erwartendem Wachstum sinnvoll.*

5

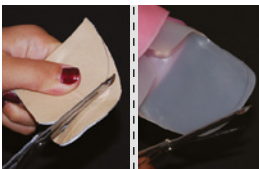

## Zuschneiden

Das Zehenpolster von der Schiene entfernen und nach dem Verlauf der markierten Linie zuschneiden (Zehenpolster, Orthese oder beides).

# 6



Das Schutzpapier entfernen und Zehenpolster auf der JumpStart Orthese anbringen.

# 7



**Endgültige Kontur und Verlauf festlegen.**

Abschließend den Konturverlauf anpassen.



**Wenn Sie ein Zehen - Abduktion - Band verwenden, Schritte 8 – 10 beachten.**

# 8



Die JumpStart Orthese anlegen und Klettverschlüsse schließen. Die beste Korrektur des Zehens bestimmt die Positionierung des Bandes.

# 9



Das Hakenband so befestigen, wie durch den Verlauf des Flauschbandes vorgegeben.

# 10



Ziehen Sie das Flauschband über den Zehen und befestigen Sie es am Hakenband. Das Flauschband auf die gewünscht Länge kürzen.



Am Schweizerbach 1  
D-71384 Weinstadt-Benzach

Telefon: 07151-99200-0  
Fax: 07151-99200-50

[www.bort.com](http://www.bort.com)  
[pm@bort.com](mailto:pm@bort.com)

CASCADE<sup>®</sup>  
daFO<sup>®</sup>

M2025/D-11/16



JumpStart Toe Rise Inst. German Rev.01 (Aug 09)