

BORT Generation

Für mehr Mobilität im Alter



Generation



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

In Bewegung und mobil bleiben.

BORT Generation – für mehr Lebensqualität im Alter



Das Leben kann so schön sein – gerade im Alter ist der Erhalt der Bewegungsfähigkeit die Basis, weiter aktiv am Leben teilhaben zu können.

Die Produkte der BORT Generation Serie unterstützen ältere Menschen dabei, den Anforderungen des Alltags besser begegnen zu können. Sie ermöglichen den Erhalt der Selbstständigkeit und der eigenen Mobilität.

Die Teilhabe am sozialen Leben bleibt erhalten. BORT Generation leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität.

**Blieben Sie in Bewegung.
Mit BORT Generation.**



BORT Generation

Das Plus für mehr Beweglichkeit im Alltag

BORT Generation Produkte wurden in Handhabung und Produktdesign speziell für Menschen mit eingeschränkter Greiffähigkeit oder Bewegungsbeeinträchtigungen entwickelt.

Sie sind einfach an- und abzulegen und angenehm im Tragekomfort. Sie stabilisieren und entlasten die Gelenke. So können sich die Anwender sicherer, schmerzfreier und selbstständiger bewegen.

**BORT Generation.
Mehr Wohlbefinden. Tag für Tag.**



BORT Generation Schulterorthese

Besonders einfach anzulegende Schulterorthese



SCHULTER- UND TAILLENGURT

für eine sichere Fixierung der Orthese



TRAGETASCHE

zur Ruhigstellung des Schultergelenks

SPEZIELL KONSTRUIERTE RÜCKENSPANGE

verhindert Verdrehen der Gurte am Rücken



EINHÄNGEVERSCHLUSS-SYSTEM

einfache und komfortable Handhabung



BORT Generation Schulterorthese

[REF] 215 700

Pos.Nr. 23.09.01.0100


Körpergröße	GRÖSSEN
bis 160 cm	Größe 1
160 – 180 cm	Größe 2
über 180 cm	Größe 3

rechts oder links angeben

MESSPUNKT

Körpergröße

ZUBEHÖR: **[REF] 991 115**
BORT Handauflage mit Ball

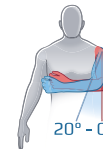

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, **subcapitale Humerusfraktur**, Lähmungserscheinungen, entzündlich, **degenerativ**



BORT Generation Daumenschiene

Stabilisierende Schiene – auch Gehhilfen sicher im Griff



INNOVATIVES KORDEL-SCHNÜR-SYSTEM

Einfache und sichere Handhabung mit wenig Kraftaufwand beim zirkulären Schließen; kompensiert die verminderte Griffstärke des älteren Menschen.



STABILITÄT

In einem Schritt zur Stabilisierung des Daumengrundgelenks anzulegen.

GEHILFEN SICHER IM GRIFF



BORT Generation Daumenschiene

REF 215 300

Pos.Nr. 23.07.01.1046

Umfang Handgelenk	GRÖSSEN
13 – 16 cm	small
16 – 19 cm	medium
19 – 22 cm	large

rechts oder links angeben

MESSPUNKT
Umfang Handgelenk



INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, **Rhizarthrose, degenerativ, entzündlich**, z. B. Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens



BORT Generation Daumen-Handorthese

Praktische Schnürung für eine einfache Handhabung



INNOVATIVES KORDEL-SCHNÜR-SYSTEM

Einfache und sichere Handhabung mit wenig Kraftaufwand beim zirkulären Schließen; kompensiert die verminderte Griffstärke des älteren Menschen.



EXTRA SICHEREN HALT

Variabel einstellbarer Bereich für verschiedene Unterarmumfänge geeignet.

BORT Generation Daumen-Handorthese

REF 215 200

Pos.Nr. 23.07.02.2033

Umfang Handgelenk	GRÖSSEN
bis 15 cm	x-small
15 – 17 cm	small
17 – 19 cm	medium
19 – 21 cm	large
21 – 23 cm	x-large

rechts oder links angeben

MESSPUNKT
Umfang Handgelenk



INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, z. B. Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS



BORT Generation Handgelenkbandage

Praktische Schnürung für eine einfache Handhabung



INNOVATIVES KORDEL-SCHNÜR-SYSTEM

Einfache und sichere Handhabung mit wenig Kraftaufwand beim zirkulären Schließen; kompensiert die verminderte Griffstärke des älteren Menschen.



EXTRA SICHEREN HALT

Variabel einstellbarer Bereich für verschiedene Unterarmumfänge geeignet.

BORT Generation Handgelenkbandage

REF 215 000

Pos.Nr. 05.07.02.3043

Umfang Handgelenk	GRÖSSEN
13 – 16 cm	small
16 – 19 cm	medium
19 – 23 cm	large

rechts oder links angeben

MESSPUNKT
Umfang Handgelenk



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, **Handwurzelarthrose**, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis



BORT Generation Handgelenkorthese

Einhändiges Anlegen durch innovativen Verschlusszügel



POLSTERUNG

Zusätzliche Polsterung im Handflächenbereich und am Daumenballen ermöglicht komfortables Tragen, auch in Verbindung mit Gehhilfen.



ZIRKULÄRES STABILO-BAND/GABEL-ZÜGELUNG

Einhändig und sicher zu bedienender Verschlussmechanismus. Eine breite Klettauflegefläche ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Handgelenk- und Unterarmumfänge.

ZUR ANWENDUNG MIT GEHILFEN GEEIGNET



BORT Generation Handgelenkorthese

REF 215 100

Pos.Nr. 23.07.02.4054

Umfang Handgelenk	GRÖSSEN
bis 15 cm	x-small
15 – 17 cm	small
17 – 19 cm	medium
19 – 21 cm	large
21 – 23 cm	x-large

rechts oder links angeben

MESSPUNKT
Umfang Handgelenk



INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen**, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung



BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung

Praktische Schnürung für eine einfache Handhabung



INNOVATIVES KORDELSCHNÜR-SYSTEM

Einfache und sichere Handhabung mit wenig Kraftaufwand beim zirkulären Schließen; kompensiert die verminderte Griffstärke des älteren Menschen.



EXTRA SICHEREN HALT

Variabel einstellbarer Bereich für verschiedene Unterarmumfänge geeignet.

ZUR ANWENDUNG MIT
GEHILFEN GEEIGNET



BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung

REF 215 150

Pos.Nr. 23.07.02.4067

Umfang Handgelenk	GRÖSSEN
bis 15 cm	x-small
15 – 17 cm	small
17 – 19 cm	medium
19 – 21 cm	large
21 – 23 cm	x-large

rechts oder links angeben

MESSPUNKT

Umfang Handgelenk



INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen**, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung



BORT Generation Rückenbandage

Leichte Bandage mit Seilzugsystem für kraftsparendes Anlegen



VISCOELASTISCHE UND GETEILTE KREUZBEINPELOTTEN

Individuelle Anlage im Lendenwirbelbereich; Pelottierung ermöglicht bessere Passform und bereichs-/punktgenaue Unterstützung der LWS; je nach Körpergröße Anlage im optimalen Druckpunkt.



KRAFTSPARENDES SEILZUGSYSTEM

Beidseitig eingeleitetes Schnürungssystem ermöglicht eine fein dosierbare und besonders kraftsparende Anlage der Rückenbandage.

SEHR LEICHTE UND WENIG AUFTRAGENDE BANDAGENKONSTRUKTION

Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte. Angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht, atmungsaktives Material.

BORT Generation Rückenbandage

REF 215 850

Pos.Nr. 23.14.03.3077

Umfang Taille	GRÖSSEN
70 – 80 cm	Größe 1
80 – 90 cm	Größe 2
90 – 100 cm	Größe 3
100 – 110 cm	Größe 4
110 – 120 cm	Größe 5
120 – 130 cm	Größe 6
130 – 140 cm	Größe 7

MESSPUNKT
Umfang Taille



INDIKATIONEN

Degenerative lumbale Veränderungen, leichte bis mittelschwere Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, radikuläres Reizsyndrom, Zustand nach Bandscheiben-OP



Steckbrief


BORT Generation Rückenorthese

Leichtes und kraftsparendes Anlegen

NEUES
DESIGN



Steckbrief

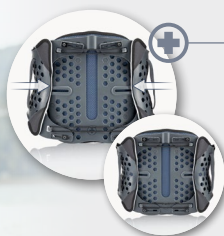


BESSERER SITZ

Der Beckenkorb der Orthese kann noch besser angepasst werden und schmiegt sich an die individuelle Körperform an, insbesondere bei weiblichen Trägern mit ausgeprägter Taillierung.

KRAFTSPARENDES SEILZUGSYSTEM

Beidseitig eingeleitetes Schnürungssystem zur besonders kraftsparenden Anlage der Rückenorthese.

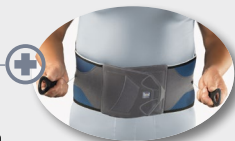

BESSERE ENTLORDOSIERUNG

Die beiden verfügbaren Rückenplatten wurden verlängert und üben so eine höhere Entlordosierungswirkung auf die Lendenwirbelsäule aus.

Von 22 auf 27 cm

Von 28 auf 31 cm

BORT Generation Rückenorthese

REF 215 800


Pos.Nr. 23.14.04.1014

Umfang Taille	GRÖSSEN
70 – 80 cm	Größe 1
80 – 90 cm	Größe 2
90 – 100 cm	Größe 3
100 – 110 cm	Größe 4
110 – 120 cm	Größe 5
120 – 130 cm	Größe 6
130 – 140 cm	Größe 7

Höhe 27 cm oder 31 cm angeben

MESSPUNKT

Umfang Taille

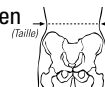

INDIKATIONEN

Facettensyndrom, Lumboschialgie, Bandscheibenprotrusion/Prolaps, radikuläres Reizsyndrom, **degenerative lumbale Veränderungen**, Zustand nach Bandscheiben-OP, stabile Frakturen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose

BORT Generation Osteoporose-Orthese

Zur Entlastung und Stabilisierung der Wirbelsäule



BAUCHPLATTE

Großflächige Klett- und Veloursflächen sowie Griffaschen erleichtern das Verschließen und optimieren den Sitz der Orthese.



HÜFTGURTE

Mit individueller Längenanpassung, Krokodil-Klettverschluss ermöglicht die korrekte Einstellung der Orthese. Kein Verrutschen der Orthese zum Oberkörper hin.

KLETTVERSCHLUSS



UMLENKVERSCHLÜSSE ZUR REKLINATION

Wie bei einem Rucksack, erleichtern sie das An- und Ablegen; ohne großen Kraftaufwand kann die Zügelstärke für die Reklination (Aufrichtung) angepasst werden.



BORT Generation Osteoporose-Orthese

REF 215 870

Pos.Nr. 23.15.04.4032


Rückenlänge	GRÖSSEN
bis 43 cm	x-small
44 – 49 cm	small
50 – 55 cm	medium
56 – 61 cm	large
62 – 67 cm	x-large

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

MESSPUNKT

Rückenlänge:

L = C7 bis Gesäßfalte

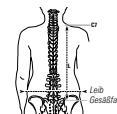

INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS / BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose



Steckbrief

BORT Generation Dynamische Osteoporose-Orthese

Dem Therapieverlauf anpassbar: von der Akut- bis zur Rehabilitationsphase



ABNEHMBARE BEGRENZUNGSZÜGEL

Durch Entfernen kann die Reklination in der Rehabilitationsphase dynamisch erfolgen.



GEPOLSTERTE SCHULTERGERTE

Mit Umlenkverschlüssen zur Reklination, erleichtern das An- und Ablegen.




UMLENKUNG DER SCHULTERGERTE

Elastisch gelagerte Schultergurte für mehr Bewegungsfreiraum in der Rotation.

ZWEITEILIGE ALUMINIUM RÜCKENSCHIENE

Anpassbare Rückenschiene zur Stabilisierung und Aktivierung, ermöglicht eine stabile und dynamische Einstellbarkeit der Orthese.

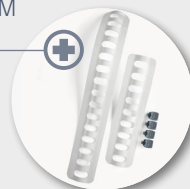

BORT Generation Dynamische Osteoporose-Orthese

REF 215 880


Pos.Nr. 23.15.04.4035

Rückenlänge	GRÖSSEN
bis 43 cm	x-small
44 – 49 cm	small
50 – 55 cm	medium
56 – 61 cm	large
62 – 67 cm	x-large

Gürtellängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

MESSPUNKT

Rückenlänge: L = C7 bis Gesäßfalte

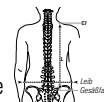

INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose



BORT Generation Hüftprotektor

Für temporäre Anwendung während Aktivitätsphasen



BREITE FRONTALE GRIFFFLASCHEN

Die Führung der Verschlussplatte über die Griffflaschen ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung für die korrekte Anlage des Hüftprotektors.



BORT Generation Hüftprotektor


REF 215 900

Keine Kassenleistung

Umfang Beckenkamm	GRÖSSEN
80 – 90 cm	small
90 – 100 cm	medium
100 – 110 cm	large
110 – 120 cm	x-large
120 – 130 cm	xx-large

MESSPUNKT

Umfang Beckenkamm

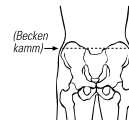

INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese,
Sturzgefährdung



BORT Generation Kniebandage

Halboffene Bauweise erleichtert den Ein- und Ausstieg



KOMPLETT ZU ÖFFNENDER
OBERSCHENKELBEREICH

Leichter und breiter Ein- und Ausstieg
in die Bandagen.



BREITE GRIFFFLASCHEN

Für eine sichere und kraft-
sparende Handhabung.

BORT Generation Kniebandage

REF 215 420

Pos.Nr. 05.04.01.0129

d-Maß	f-Maß	GRÖSSEN
26 – 29 cm	32 – 36 cm	Größe 1
29 – 33 cm	36 – 40 cm	Größe 2
33 – 37 cm	40 – 48 cm	Größe 3
37 – 41 cm	44 – 52 cm	Größe 4
41 – 45 cm	52 – 60 cm	Größe 5
45 – 49 cm	60 – 68 cm	Größe 6
49 – 53 cm	68 – 76 cm	Größe 7

rechts und links gleich

MESSPUNKTE

Umfang Ober-/Unterschenkel



INDIKATIONEN

Gonarthrose, rezidivierender Gelenker-
guss, Arthritis, leichte Bandschwäche



BORT Generation Kniebandage Plus

Halboffene Bauweise erleichtert den Ein- und Ausstieg



KOMPLETT ZU ÖFFNENDER OBERSCHENKELBEREICH

Leichter und breiter Ein- und Ausstieg
in die Bandagen.



BREITE GRIFF- LASCHEN

Für eine sichere und kraft-
sparende Handhabung.

INTEGRIERTE GRIFFPOLSTER

Erleichtern die Anlage auch bei eingeschränkter
Greiffähigkeit.

ZIRKULÄRES VERSCHLUSSBAND

Zur verbesserten Stabilisierung am
Oberschenkel.



BORT Generation Kniebandage Plus

REF 114 490 G

Pos.Nr. 05.04.01.2003

d-Maß	f-Maß	GRÖSSEN
26 – 29 cm	32 – 36 cm	Größe 1
29 – 33 cm	36 – 40 cm	Größe 2
33 – 37 cm	40 – 48 cm	Größe 3
37 – 41 cm	44 – 52 cm	Größe 4
41 – 45 cm	52 – 60 cm	Größe 5
45 – 49 cm	60 – 68 cm	Größe 6
49 – 53 cm	68 – 76 cm	Größe 7

rechts und links gleich

MESSPUNKTE

Umfang Ober-/Unterschenkel



INDIKATIONEN

Gonarthrose, rezidivierender Gelenker-
guss, Arthritis, leichte Bandschwäche



BORT Generation Knieorthese

Komplett zu öffnen – einfachstes An- und Ablegen

NEUES
DESIGN

OFFENER KNIEKEHLENBEREICH

Für komfortables Beugen, z. B. beim Sitzen.

BREITE GRIFFLASCHE UND EXTRA BREITE UMLENKSCHLAUFEN

Für eine sichere Handhabung
auch bei motorischen Defiziten.

OFFENE FORM

Die Orthese ist komplett zu
öffnen und kann auf dem Knie
von vorne rutschfrei zur Anlage
aufgelegt werden.



Einstellbares Polkurrengelenk,
angelehnt an die physiologische
Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

MESSPUNKTE
Umfang Ober-/Unterschenkel



BORT Generation Knieorthese

REF 215 400

Pos.Nr. 23.04.03.1046

d-Maß	f-Maß	GRÖSSEN
26 – 29 cm	32 – 36 cm	Größe 1
29 – 33 cm	36 – 40 cm	Größe 2
29 – 33 cm	40 – 44 cm	Größe 2+
33 – 37 cm	40 – 44 cm	Größe 3
33 – 37 cm	44 – 48 cm	Größe 3+
37 – 41 cm	44 – 48 cm	Größe 4
37 – 41 cm	48 – 52 cm	Größe 4+
41 – 45 cm	52 – 56 cm	Größe 5
41 – 45 cm	56 – 60 cm	Größe 5+
45 – 49 cm	60 – 64 cm	Größe 6
45 – 49 cm	64 – 68 cm	Größe 6+
49 – 53 cm	68 – 72 cm	Größe 7
49 – 53 cm	72 – 76 cm	Größe 7+

rechts und links gleich

INDIKATIONEN

Degenerative Erkrankungen, z. B. **leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Meniskusverletzungen**



Steckbrief

BORT Generation Soft OA-Knieorthese

Zur Achskorrektur des Kniegelenks



LEICHT LESBARE MARKIERUNG

Markierung der Funktionselemente unterstützt das selbstständige Anlegen.

EINSTELLBARES, POLYZENTRISCHES GELENK

BREITE GRIFFLASCHEN UND UMLENKSCHLAUFEN

Für eine sichere Handhabung auch bei motorischen Defiziten.

OFFENE FORM

Orthese ist komplett zu öffnen, dadurch einfaches und sicheres Anlegen.

MESSPUNKTE

Umfang Ober-/Unterschenkel



BORT Generation Soft OA-Knieorthese

REF 215 440

Pos.Nr. 23.04.04.1024

d-Maß	f-Maß	GRÖSSEN
32 – 36 cm	38 – 44 cm	Größe 1
36 – 42 cm	44 – 50 cm	Größe 2
42 – 48 cm	50 – 56 cm	Größe 3
48 – 54 cm	56 – 62 cm	Größe 4
54 – 60 cm	62 – 68 cm	Größe 5

Modell A _____ rechts varus/links valgus

Modell B _____ rechts valgus/links varus

Modell A oder B angeben

INDIKATIONEN

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II - III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), mediale/laterale Gonarthrose in Folge einer Tibiakopffraktur



Steckbrief

BORT Generation Knöchelbandage

Halboffene Bauweise erleichtert den Ein- und Ausstieg



ERLEICHTERTER EINSTIEG

Die halboffene Bauweise vereinfacht den Ein- und Ausstieg der Bandage.



EINFACHE REGULIERUNG

Leichtes fixieren der Bandage über zwei Klettverschlüsse.

BORT Generation Knöchelbandage


REF 215 600

Pos.Nr. 05.02.01.0084

Fesselumfang	GRÖSSEN
bis 21 cm	small
21 – 23 cm	medium
23 – 25 cm	large
25 – 27 cm	x-large
27 – 29 cm	xx-large

rechts und links gleich

MESSPUNKT
Fesselumfang

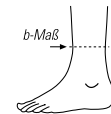

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose



BORT Generation Hallux-Valgus-Schiene

Angenehmer Tragekomfort durch weiches Material

FLEXIBLER BEREICH

Entlastungsringpelotte auf Höhe des Großzehengrundgelenkes.



VARIABLE EINSTELLBAR

Stufenlose Einstellung der Druckregulierung dank seitlich positioniertem Korrekturband.

PELOTTE ZUR ENTLAS-
TUNG DES GROSSZEHEN-
GRUNDGELENKS



FESTE UND DYNAMISCHE
STABILISIERUNGS-
ELEMENTE, ANWENDUNG
JE NACH BEDARF



BORT Generation Hallux-Valgus-Schiene

REF 215 930

Pos.Nr. 23.01.01.0018

Schuhgröße	GRÖSSEN
35 – 37	Größe 0
38 – 40	Größe 1
41 – 43	Größe 2

rechts oder links angeben

MESSPUNKT

Schuhgröße

INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung



BORT Generation

Das Produktsortiment mit der besonders einfachen Handhabung



REF 215 700

Pos.Nr. 23.09.01.0100

BORT Generation Schulterorthese

Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit Tragetasche zur Ruhigstellung des Schultergelenks. Einfache und komfortable Handhabung durch Einhängeverschlussystem. Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen, Entzündungen, Degeneration.



REF 215 300

Pos.Nr. 23.07.01.1046

BORT Generation Daumenschiene

Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks mit weichem Innenpolster und praktischer Schnürung für eine einfache und sichere Handhabung. Zur Anwendung bei Rhizarthrose, Arthritis oder ulnarer/radialer Bandverletzung des Daumens.



REF 215 200

Pos.Nr. 23.07.02.2033

BORT Generation Daumen-Handorthese

Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks mit weichem Innenpolster und praktischer Schnürung für eine einfache und sichere Handhabung. Z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen.



REF 215 000

Pos.Nr. 05.07.02.3043

BORT Generation Handgelenkbandage

Gepolsterte Handgelenkbandage mit volarer Verstärkung. Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch. Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung. Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator.



REF 215 100

Pos.Nr. 23.07.02.4054

BORT Generation Handgelenkorthese

Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung. Innovativer Verschlusszügel ermöglicht einfaches Anlegen. Bei Handwurzelarthrosen, entzündlich-rheumatischen, degenerativen Erkrankungen.



REF 215 150

Pos.Nr. 23.07.02.4067

BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung

Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung. Die praktische Schnürung ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung. Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich. Bei Handwurzelarthrosen, entzündlich-rheumatischen, degenerativen Erkrankungen, Karpaltunnelsyndrom (CTS).



BORT Generation Rückenbandage
Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS durch integrierte Stabilisierungselemente. Zur Anwendung bei leichter bis mittelschwerer Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, oder nach Bandscheiben-OP.



BORT Generation Rückenorthese
Wirbelsäulen-Orthese zur Entlastung und Stabilisierung der LWS dank integriertem Beckenkorb aus Kunststoff. Bei Bandscheibenprotrusion/Prolaps, degenerativen lumbalen Veränderungen oder nach Bandscheiben-OP.



BORT Generation Hüftprotektor
Hüft-Protektorgurt mit stoßabsorbierender Wirkung und entnehmbaren Protektoren zur Anwendung bei Sturzneigung unterschiedlicher Genese oder bei Sturzgefährdung.



BORT Generation Osteoporose-Orthese
Aktivierende und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthese mit stabiler Aluminium-Rückenschiene und integriertem Gurtsystem nach Rucksackprinzip. Zur aktiven Aufrichtung und zur Entlastung der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Saggitalebene, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen.



BORT Generation Dyn. Osteoporose-Orthese
Aktivierende und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthese mit zweiteiliger, stabiler Aluminium-Rückenschiene und integriertem Gurtsystem nach Rucksackprinzip. Schultergurt und Rückenschiene sind stabil und dynamisch einstellbar. Zur aktiven Aufrichtung und zur Entlastung der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Saggitalebene.



BORT Generation Kniebandage
Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite, zur Behandlung bei Gonarthrose, rezidivierendem Gelenkerguss, Arthritis oder leichter Bandschwäche.



BORT Generation Kniebandage Plus

Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite, Griffpolstern und zirkulärem Verschlussband. Zur Anwendung bei Gonarthrose, rezidivierendem Gelenkerguss, Arthritis oder leichter Bandschwäche.



BORT Generation Knieorthese

Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks. Zur Behandlung bei degenerativen Erkrankungen, z. B. leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose oder Meniskusverletzungen.



BORT Generation Soft OA-Knieorthese

Soft-Entlastungsorthese bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose mit einstellbarem, polyzentrischen Gelenk. Zur partiellen Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II – III, Bone Bruise oder mediale/laterale Gonarthrose in Folge einer Tibiakopffraktur.



BORT Generation Knöchelbandage

Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression mit hochelastischer Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich. Einfache Regulierung und Fixierung der Bandage durch Klettverschlüsse. Zur Anwendung bei Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen und Arthrose.



BORT Generation Hallux-Valgus-Schiene

Soft-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Großzehe und des Großzehengrundgelenkes. Nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs oder postoperativ zur Kapselentlastung.

Das Generation Plus von BORT.

- ⊕ Einfache Handhabung für mehr Selbstständigkeit
- ⊕ Sichere Anwendung durch gute Kennzeichnung
- ⊕ Unterstützung ohne Einschränkung
- ⊕ Bequeme Trageeigenschaften

 Generation

Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Versorgung
mit BORT Bandagen und Orthesen

(Ihr Händlereindruck)

M2116|2024-08|008 DE | Rev.01

