

# BORT X-Walker

Das Orthesenprogramm zur Versorgung  
von Fuß- und Sprunggelenksverletzungen



- ⊕ Mit großflächigem Vakuum-System zur formschlüssigen Stabilisierung
- ⊕ Besonders einfach in der Handhabung
- ⊕ In drei Ausführungen erhältlich (lang/kurz/Achillo)

Mit  
Vakuum-  
System

BORT X WALKER

Med

# Einfach gut versorgt: BORT X-Walker

Der BORT X-Walker ist die zeitgemäße Lösung für die postoperative und konservative Versorgung von Verletzungen an Fuß, Sprunggelenk und Achillessehne. Er sorgt für die medizinisch notwendige Stabilisierung und Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in therapeutisch notwendiger Position und kann so den Heilungsprozess fördern.

## Großflächiges Vakuum-System

zur formschlüssigen Bettung und Stabilisierung. Das in den Polsterliner integrierte, mit Granulat gefüllte Vakuumkissen lässt sich durch die mitgelieferte Vakuumpumpe optimal an die Fuß- bzw. Unterschenkelform anpassen. Druckstellen können durch die gleichmäßige und individuell anpassbare Bettung vermieden werden.



ABNEHMBARER LINERBEZUG

– Zur leichten Reinigung

## BORT X-Walker lang

### INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen, stabile distale Unterschenkelrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

### JUSTIERBARER WADENUMFANG

– Optimale Passform für unterschiedliche Wadenumfänge



### GRÖSSENAUSWAHL

– Erhältlich in small/medium/large zur Versorgung von Schuhgröße 35 bis 50

### LÄNGENVERSTELLBARES FUSSBETT MIT ZEHENSCHUTZ

– Für eine einfache Anpassung der Fußlänge



Abnehmbarer  
Linerbezug

### LAUFSOHLE

– Therapieunterstützend mit sehr guten Abrolleigenschaften



# für Fuß- und Sprunggelenk

Als Weiterentwicklung der bewährten BORT Air Walker verfügen die ergonomisch geformten Orthesen über ein großflächiges Vakuum-System. Der BORT X-Walker ist in drei Ausführungen erhältlich und gewährleistet die indikationsgerechte und einfach zu handhabende Versorgung. Praktisches Zubehör unterstützt dabei die komfortable Anwendung.

## BORT X-Walker kurz

### INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuß- und Mittelfußregion, Metatarsalfraktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

Abnehmbarer  
Linerbezug



## BORT X-Walker Achillo

– Zur Therapie von Verletzungen der Achillessehne

### INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, postoperativ bei Achillessehnennaht

Abnehmbarer  
Linerbezug



### 5-STUFIGES FERSENKEIL-SET


– Zur Justierung der therapeutisch notwendigen Spitzfußstellung



## Wir unterstützen Sie: Produktinformationen, Anlege- und Übungsvideos

Die BORT X-Walker Website mit Informationen für den Fachhandel und Patienten (erreichbar über einen QR-Code am Produkt) beschreibt den therapeutischen Nutzen und beantwortet Fragen rund um den BORT X-Walker.

Sie bietet außerdem Anlegevideos für die einzelnen Modelle sowie Übungsvideos für Fuß- und Sprunggelenk.

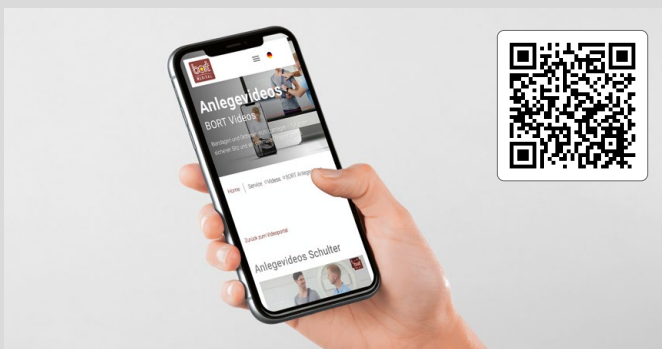



# Produktübersicht BORT X-Walker

Steckbriefe

## BORT X-Walker lang

REF 101 300

NEUES DESIGN



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0081

### PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsole mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

### INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen, stabile distale Unterschenkelrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

### DAS MED-PLUS

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Abnehmbarer Bezug
- Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel

### GRÖSSEN

Größe	Schuhgrößen
small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

rechts und links gleich

## BORT X-Walker kurz

REF 101 350

NEUES DESIGN



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0080

### PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsole mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

### INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuß- und Mittelfußregion, Metatarsalfaktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

### DAS MED-PLUS

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- Abnehmbarer Bezug
- Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel

### GRÖSSEN

Größe	Schuhgrößen
small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

rechts und links gleich

## BORT X-Walker Achillo

REF 101 320

NEUES DESIGN



Med

Pos.Nr. 23.06.01.1023

### PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in definierter, einstellbarer Position
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsole mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

### INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, postoperativ bei Achillessehnennaht

### DAS MED-PLUS

- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfußstellung
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Abnehmbarer Bezug
- Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel

### GRÖSSEN

Größe	Schuhgrößen
small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

rechts oder links angeben

## Zubehör für alle BORT X-Walker

REF 100 370

### BORT Unterziehstrumpf

- Erhöht den Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Passend für alle BORT X-Walker
- **Verpackung: Stück**

Größe  
Nur eine Größe



REF 100 380

### BORT Nässeeschutzhülle

- Bedeckt die Fußpartie, Laufsole bleibt frei
- Nässeabweisend und atmungsaktiv
- Passend für alle BORT X-Walker
- **Verpackung: Stück**

Walkergröße	Größe
x-small/small	Größe 1
medium/large	Größe 2
x-large	Größe 3

rechts und links gleich



REF 100 390

### BORT Schutzhülle für die Nacht

- Bedeckt die Fuß- und Laufsohlenregion
- Zur hygienischen Anwendung bei Nacht
- Atmungsaktiv, passend für alle BORT X-Walker
- **Verpackung: Stück**

Walkergröße	Größe
x-small/small	Größe 1
medium/large	Größe 2
x-large	Größe 3

rechts und links gleich



## BORT GmbH

Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt  
Telefon (07151) 99200-0 | Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com

Vertrieb in der Schweiz durch:

**Orthosan AG**  
Freiburgstrasse 634 | CH-3172 Niederwangen b. Bern  
www.orthosan.ch



MZ252/2024-09/003 DE | Rev 01

4 103586 2118 10116