

BORT OmoControl Schultergelenkorthese


Komfortabel und sicher anlegen



Die Orthese dient der physiologischen Führung und Stabilisierung des Schultergelenks.
Die Anleitung beschreibt die Anlegemöglichkeit im Sitzen.




- 1 – BOA® Fit System auf der Schultermanschette (A) durch Ziehen am Drehklickverschluss öffnen (klickendes Geräusch)
- Schultermanschette (A) und Armmanschette (B) auseinanderziehen, bis das ganze Seil aus dem System gezogen ist
- BOA® Fit System wieder zusammendrücken (klickendes Geräusch beim Einrasten)

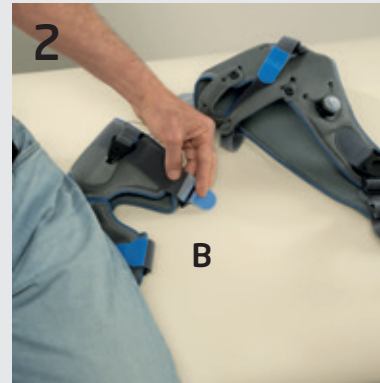

- 2 – Armmanschette (B) kann unter dem Oberschenkel fixiert werden
- Klettverschlüsse vollständig aus den Umlenkschlaufen der Armmanschette (B) ziehen



- 3 – Langes Ende des Brustgurtes unter dem Oberschenkel fixieren
- Zeigefinger durch Lasche an der Schultermanschette (A) führen
- Umlenkschleife mit Daumen und Mittelfinger bis zum Drehklickverschluss ziehen
- Brustgurt ist somit auf volle Länge ausgezogen, der Drehklickverschluss bleibt geschlossen

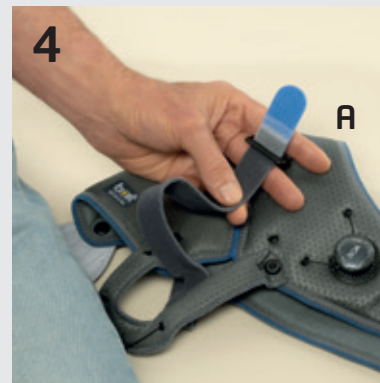

- 4 – Achselgurt lockern, dies ermöglicht später ein leichteres Hindurchführen des betroffenen Armes



- 5 – Blauen Schnellverschluss (verbindet Armmanschette mit Seilzugsystem) durch Aushaken öffnen
- Der hintere graue Schnellverschluss bleibt verschlossen



- 6 – Betroffenen Arm unter dem Brustgurt (C) und durch den Achselgurt hindurchführen



- 7 – Oberen Rand der Schultermanschette mit dem gesunden Arm fassen und Schulterkappe nach oben über die Schulter ziehen
- Dabei Brustgurt mit nach oben führen



- 8 – Brustgurt über Kopf und gesunden Arm führen
- Darauf achten, dass sich der Gurt nicht verdreht

BORT OmoControl Schultergelenkorthese

Komfortabel und sicher anlegen



Die Orthese dient der physiologischen Führung und Stabilisierung des Schultergelenks. Die Anleitung beschreibt die Anlegemöglichkeit im Sitzen.



9

- Brustgurt mit einem festen, angenehmen Zug straffen und mittels Klettverschluss wieder auf selbigen ankleben



10

- Obere Führung des BOA® Fit Systems auf dem Schulterdach (Acromium) positionieren, um optimale Funktionalität zu gewährleisten



11

- Achselgurt schließen
- Auf festen, aber nicht zu engen Sitz achten



12

- Blauen Steckverschluss der Armmanschette in den unteren Schlitz der Umlenk-schleife klemmen



13

- Armmanschette auf dem Oberschenkel ablegen und Ellenbogen so darin platzieren, dass dieser im Sichtfenster der Manschette liegt
- Klettverschlüsse durch Umlenk-schleifen führen und mit einem festen, angenehmen Zug schließen



14

- Den zuvor an der Umlenk-schleife des Achselgurtes fixierten Klickverschluss lösen und durch Einhaken mit dem Gegenstück des Verschlusses der Armmanschette verbinden
- Das BOA® Fit System der Schultermanschette ist mit der Armmanschette verbunden
- Die zueinander gehörigen Klickverschlüsse haben die gleiche Färbung



15

- Vorsichtig in aufrechte Position stellen
- Durch Drehen des BOA® Fit Systems im Uhrzeigersinn kann der Arm in Richtung Schultergelenk gezogen werden



16

- Der Anlegeprozess ist abgeschlossen



Über den QR-Code finden Sie auf der Website unser Video zum Anlegevorgang.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den betreuenden Arzt bzw. Sanitätsfachhandel.