

BORT Spezial-Waschmittel

für medizinische Kompressionsgestricke



- ⊕ Speziell für medizinische Kompressionsgestricke
- ⊕ Höchste Reinheit bei der Handwäsche
- ⊕ Einfache Anwendung für den täglichen Gebrauch



REF 599 070
PZN: 13059911
BORT Spezial-Waschmittel
Inhalt: 250 ml


REF 599 076
PZN 13059928
BORT Spezial-Waschmittel – 6er Pack
Inhalt: 6 x 250 ml

Eigenschaften:

BORT Spezial-Waschmittel ist ein ph-neutrales, hochwirksames Handwaschmittel-Konzentrat für alle gummielastischen Gestricke. Es entfaltet bereits bei 30°C seine volle Waschkraft, ist desodorierend und biologisch abbaubar. BORT Spezial-Waschmittel trocknet die elastischen Teile des Gestricks nicht aus und sorgt für die bestmögliche Pflege Ihrer Hilfsmittel.

Anwendung:

Eine halbe Verschlusskappe (10 ml) in ca. 2-3 l handwarmem Wasser auflösen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser ausspülen.


 10 ml auf 2-3 l Wasser

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffangabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergentienverordnung)

AQUA, SODIUM C14-17 SEK ALKYL SULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE, PPG-4 LAURETH-5, COCAMIDE DEA, ISOPROPYL ALCOHOL, LAURETH-2, PARFUM, DIETHANOLAMINE, LINALOOL, AMYL SALICYLATE

Informationen über INCI-Bezeichnungen unter <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>
Stand: 23.06.2016

 Hersteller Ultrana GmbH, D-88345 Bad Saulgau
Vertrieb durch: BORT GmbH, Postfach 1330, D-71367 Weinstadt, www.bort.com
Vertrieb in der Schweiz durch: Orthosan AG, www.orthosan.ch

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com